

Modul Articulate 3D



Programmversion	BASIC	2D PRO	3D PRO	LAB	OMS
Verfügbarkeit	✗	✗	📄	📄	📄

✗ nicht
enthalten

📄 immer
enthalten


📄 optional
enthalten

Modul Articulate 3D erlaubt das Einlesen digitalen Axiografiedaten verschiedener Systeme, z.B. ModJaw, Ignident, Zebris, Promax u.a. Die Daten können genutzt werden, um aufgezeichnete Kieferbewegungen zu visualisieren, den Bewegungsraum zu analysieren, Kiefergelenkspositionen abzuschätzen und okklusale Relationen für die Verwendung in anderen Modulen einzustellen.

Erste Schritte

1. Modul vom Scanbefund aus öffnen
2. Bewegungsdaten laden (XML)
3. zugehörige Einzelkieferscans laden
4. Einzelkieferscans am Scanbefund registrieren
5. Bewegungsprofile einzeln oder kombiniert verwenden

Moduloberfläche

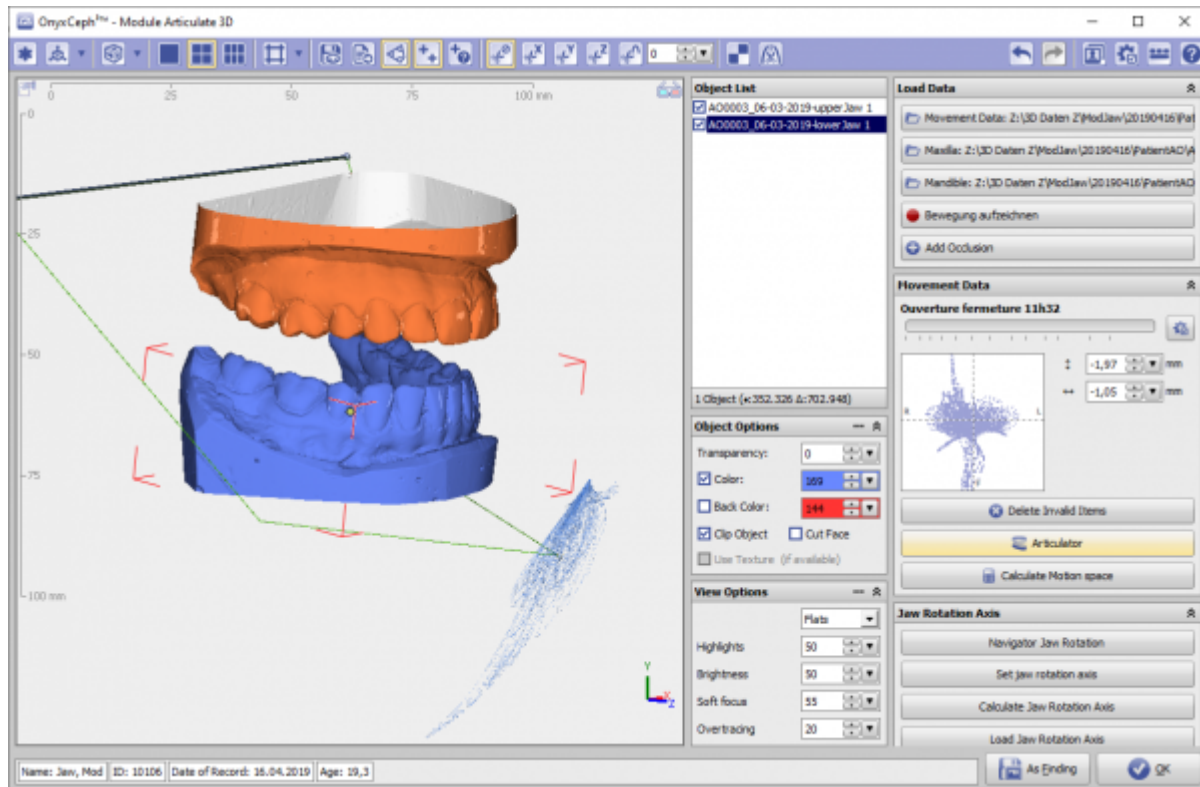

Verweise



From:
<https://www.onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:
https://www.onyxwiki.net/doku.php?id=articulate_3d

Last update: **2023/02/20 17:30**

