

Modul Bracket Adapt 3D



Programmversion	BASIC	2D PRO	3D PRO	LAB	OMS
Verfügbarkeit	✗	✗	📦	📦	📦

✗ nicht
enthalten

📦 immer
enthalten


📦 optional
enthalten

Mit Modul Bracket Adapt 3D kann die Basis der in der Planung verwendeten Brackets in Richtung Krone verlängert und individuell strukturiert werden. Die so neu konstruierten Brackets können einzeln oder bereits auf einer rechteckigen Druckplattform angeordnet im STL-Format exportiert werden, um mit Hilfe von Rapid-Prototyping-Verfahren eine individualisierte Apparatur herzustellen. Es können nur solche Brackets verwendet werden, für die der 3D-Export vom Hersteller freigegeben wurde.

Erste Schritte

1. Modul mit Modelldatensatz mit Brackets starten
2. Individuelle Bracketbasis parametrisieren
3. Fertigungsgerechte Anordnung konfigurieren
4. Brackets berechnen / exportieren
5. Planung als Befund speichern

Moduloberfläche

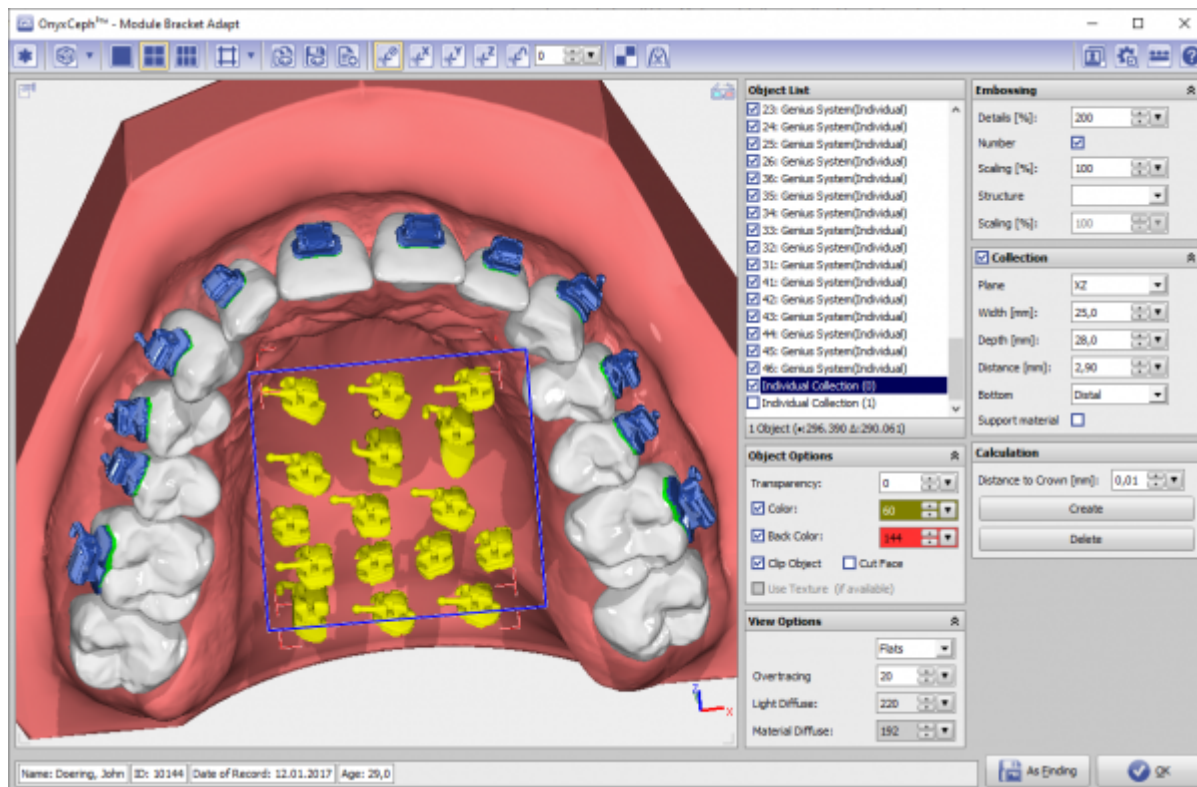

Verweise

n/a

From:
<https://onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:
https://onyxwiki.net/doku.php?id=bracketdesigner_3d

Last update: **2023/03/09 14:53**

