

Client-Programm OnyxReport



Um die in OnyxCeph³™ vorhandenen Informationen auch für Personen verfügbar zu machen, die selbst über keine Softwarelizenz verfügen, können innerhalb des Hauptprogramms Reports zusammengestellt und als Datei lokal gespeichert oder auf einen FTP- oder Webserver hochgeladen werden.

Programmoberfläche

Report

×

↑

↓

FB2354 - Roots, Tooth

4178 - Klüber, Johannes

Daten

☒ Send Anonymously

Options

Recipient's language

English

▼

☐ Password

☒ Send Email with FTP-Upload

Images

Slides

No.	Type	Date of Record	Image
☒ 1	CT-HeadScan	03.03.2022	☒
☒ 2	Lateral Right	03.11.2021	☒
☒ 3	Cast Dedduous 3D	23.11.2021	☒
☒ 4	Cast Mixed 3D	23.11.2021	☒

Comment about Patient

Add patient specific comments here

Sender

Image Instruments

Message for recipient

Add a message for the recipient here

?

 Help

✓

 Preview

✕

 Close

From:
<http://onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:
http://onyxwiki.net/doku.php?id=program_onyxreport&rev=1588065121

Last update: 2020/04/28 11:12

[OnyxCeph³™ Wiki] - <http://onyxwiki.net/>

