


# Auswahllisten

## Auswahlliste Praxis

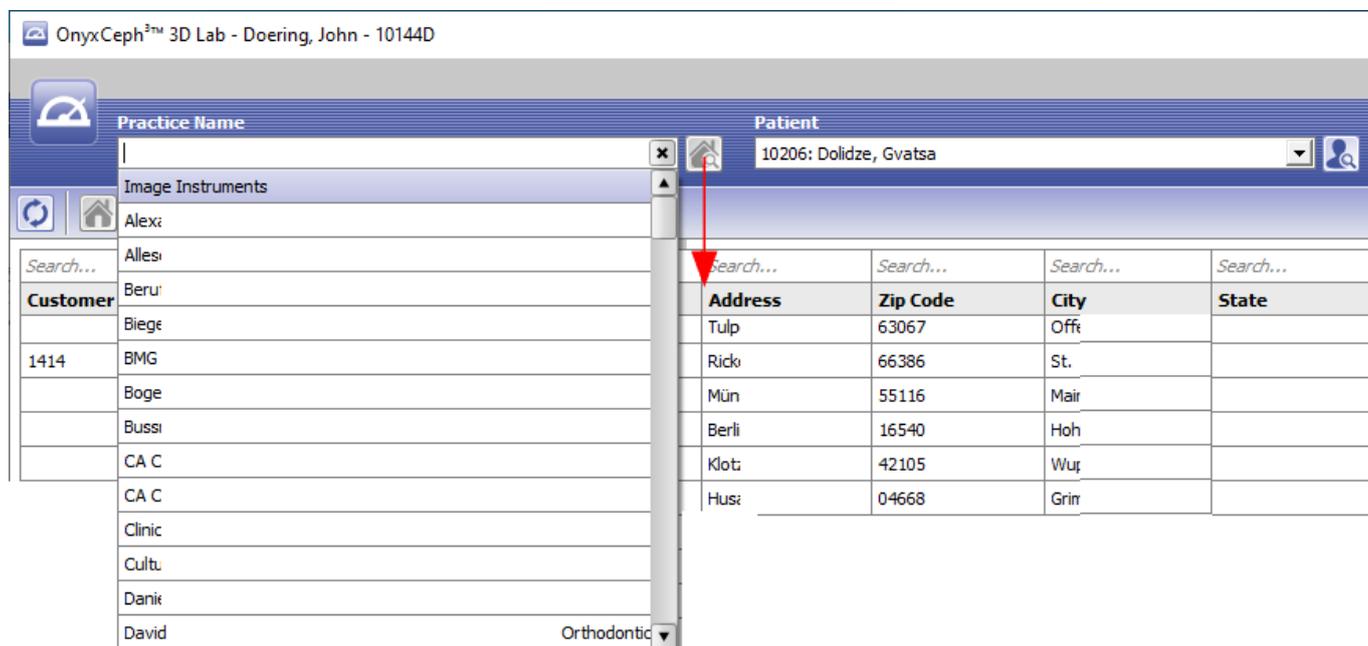

Die Software OnyxCeph<sup>3</sup>™ kann parallel mehrere Mandanten verwalten. Neue Mandanten (Praxen, Klienten) werden automatisch durch den Container-Import von Patientendaten von einem anderen Lizenznehmer angelegt. Dies stellt sicher, dass Patientendaten immer ihrer behandelnden Praxis zugeordnet bleiben und beim Rücksenden per Container mit oder ohne erfolgte Änderungen automatisch richtig zugeordnet und synchronisiert werden.

Sollen importierte Daten dauerhaft in der übernehmenden Praxis verbleiben, können diese mittels Thumbnail-Kontextmenü [Senden an|Transfer] in den sog. Home-Client verschoben werden ►►

## Auswahlliste Patient

OnyxCeph<sup>3™</sup> 3D Lab - Doering, John - 10144D

Practice Name: Image Instruments Patient: 10144D: Doering, John

10144D: Doering, John  
10000: Demo, fffff  
D-0006Neu: Hanson, Lisa  
10139: Dreher, F  
00007012: Dente  
Ignident\_2020: F  
Proaxis: Иркытс  
10152: Proco###  
10014: Doe, Joh  
22222: Patient, I  
History...

Patient's ID	Last Name	First Name	Gender	Model № / L...	Date					
10206	Dc		Female		12.12.					
5046@DICO...	Dr		Female		01.01.					
10139	Dr		Male		23.02.					
10043	Dr		Male		22.05.2005					3
10147	Dr		Male		28.01.2006					18
10108	ds		Male		16.05.2009					0
21212	Du		Male		04.07.2006					2
10109	Ed		Intersexual		12.12.1987					2
22787	EF		Female		24.01.1981					1
D-0005	Eik		Male		25.11.2005					0

From:  
<http://onyxwiki.net/> - [OnyxCeph<sup>3™</sup> Wiki]

Permanent link:  
<http://onyxwiki.net/doku.php?id=pulldownmenu&rev=1515422698>

Last update: 2018/01/08 15:44

