


Systemoptionen - Schnittstellen - VDDS-Bildquellen

Alle in der lokalen Kommunikationsdatei VDDS:_MMI unter C:\Windows eingetragenen VDDS-Bildverwaltungssysteme (BVS) können die Optionen

Option	Beschreibung
Aufnahme	Start des BVS im Bildaufnahme-Mode
Auswahl	Thumbnailansicht zur Auswahl der zu übernehmenden Bilder
Liste	Listenansicht zur Auswahl der zu übernehmenden Bilder
Start	Start-Eintrag im OnyxCeph ³ ™-Hauptmenü [Gehe zu]

bereitstellen. Welche dieser Optionen am Arbeitsplatz in OnyxCeph³™ angeboten bzw. genutzt werden sollen, kann über die Checkboxes für jeden Partner separat voreingestellt werden.

Je nach Verwendung des Parameters "PVS_Limit" kann die Kommunikation vom BVS aus auf ein ausgewähltes Praxisverwaltungssystem (PVS) eingeschränkt worden sein. Um von OnyxCeph³™ aus auch auf Patienten bzw. deren Bilder zugreifen zu können, die im BVS exklusiv von einem anderen PVS angelegt wurden, muss die Checkbox [Stammdaten immer übergeben] aktiviert werden. Dies trifft z.B. bei der Konfiguration des BVS byzz zu.

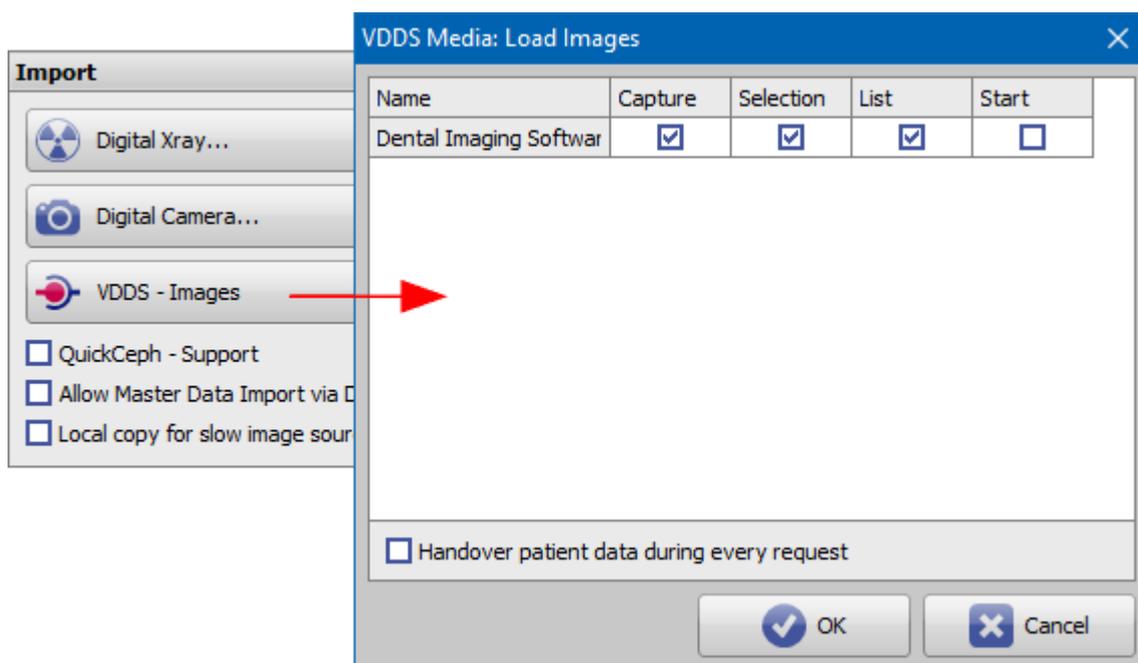

From:
<http://onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:
http://onyxwiki.net/doku.php?id=settings_vdds_ims

Last update: **2022/05/13 11:17**

