


Export-Einstellungen für SIMPLEX Slicer


Der Export von 3D Datensätzen aus der OnyxCeph³™ heraus unterstützt eine Vielzahl von Optionen und Parametern. Eine ausführliche Beschreibung zu den unterschiedlichen Möglichkeiten findet sich auf der OnyxWiki-Seite [3D-Export](#).

Nachfolgend werden nur die Einstellungen beschrieben, die für die Verwendung von Renfert-Druckern mit der Slicer-Software SIMPLEX dringend beachtet werden sollten.

Einstellung des Programmaufrufes

Um den zu exportierenden 3D-Datensatz aus OnyxCeph³™ heraus direkt an die SIMPLEX sliceware übergeben zu können, muss der Programmpfad der Software über Hauptmenü [F10]-Eintrag [Optionen|Systemoptionen] auf Reiter [\[Schnittstellen\]](#) vorgegeben und der Eintrag mit der Checkbox darüber aktiviert werden:

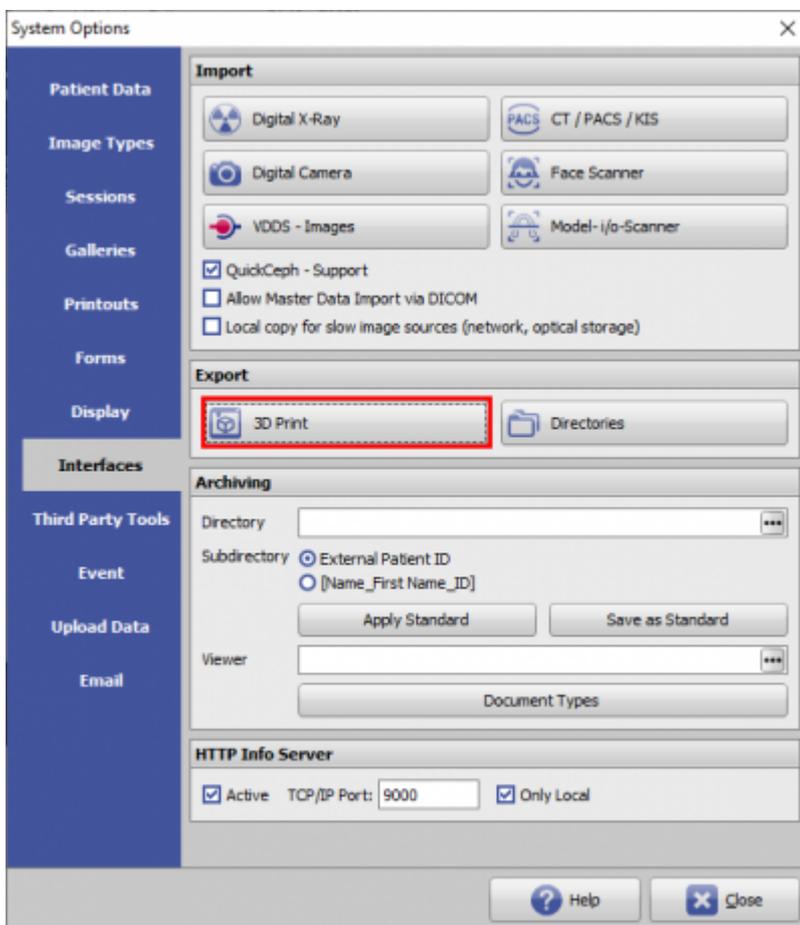


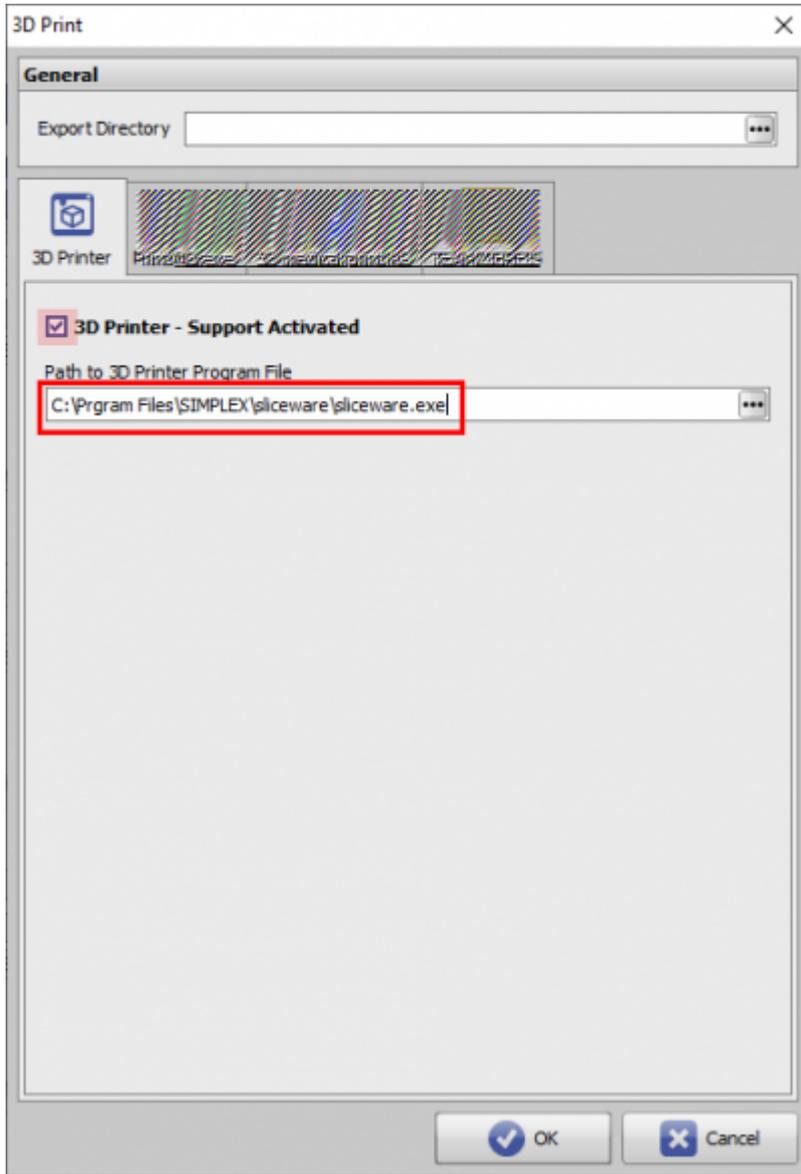

Übergabe an SIMPLEX sliceware


Der Aufruf des 3D-Exportfensters erfolgt über Thumbnail-Kontextmenüeintrag [Speichern] des zu exportierenden Datensatzes.

Im Exportfenster die gewünschten Einstellungen wählen.

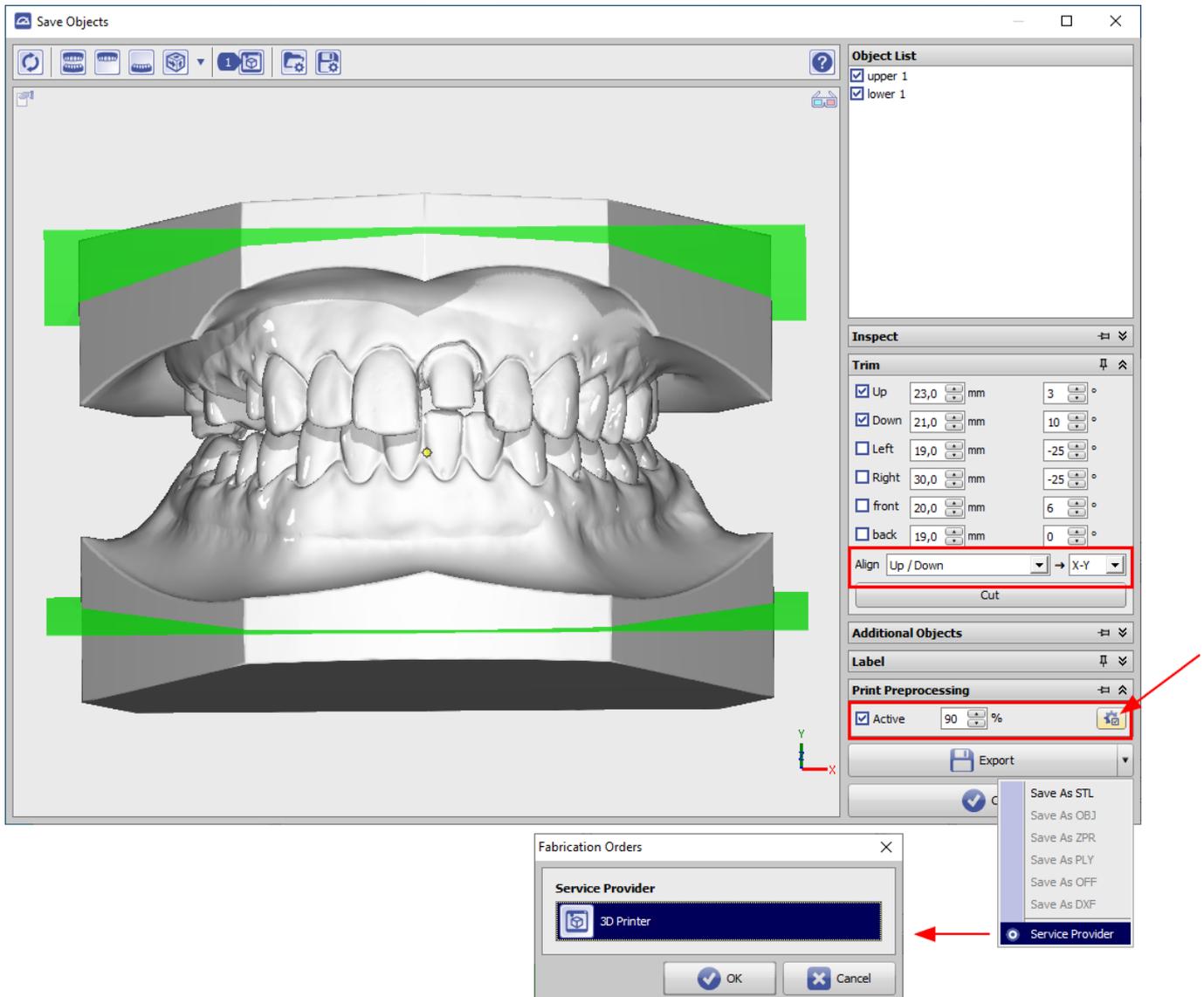

Für die Übergabe an SIMPLEX Slicer wichtig:

- Panel Beschneiden: Ausrichtung auf [oben/unten] und Orientierung [X-Y]
- Panel Druckvorverarbeitung: aktivieren und alle Exportoptionen deaktivieren.
- Dateigröße im Export optional auf z.B. 20 MByte begrenzen

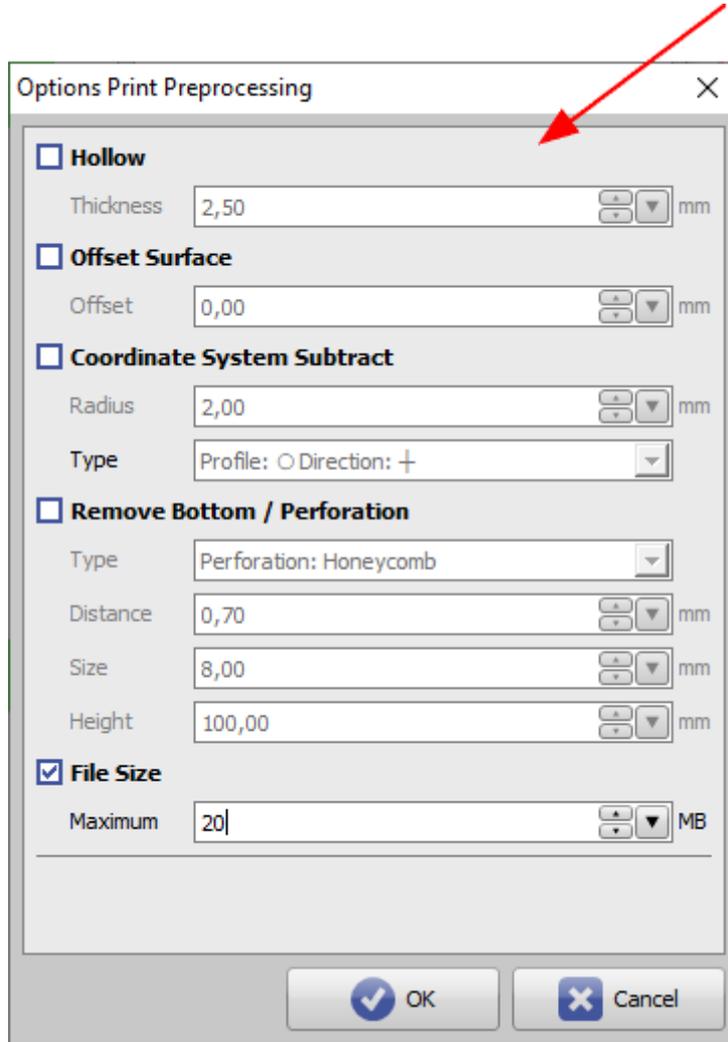

From: <https://www.onyxwiki.net/> - [OnyxCeph^{3™} Wiki]

Permanent link: https://www.onyxwiki.net/doku.php?id=simplex_export

Last update: 2024/01/09 15:05

