


Systemoptionen - Tab |Externe Programme|

Auf Systemoptionen-Reiter |Externe Programme| können Kommunikationsoptionen konfiguriert werden.

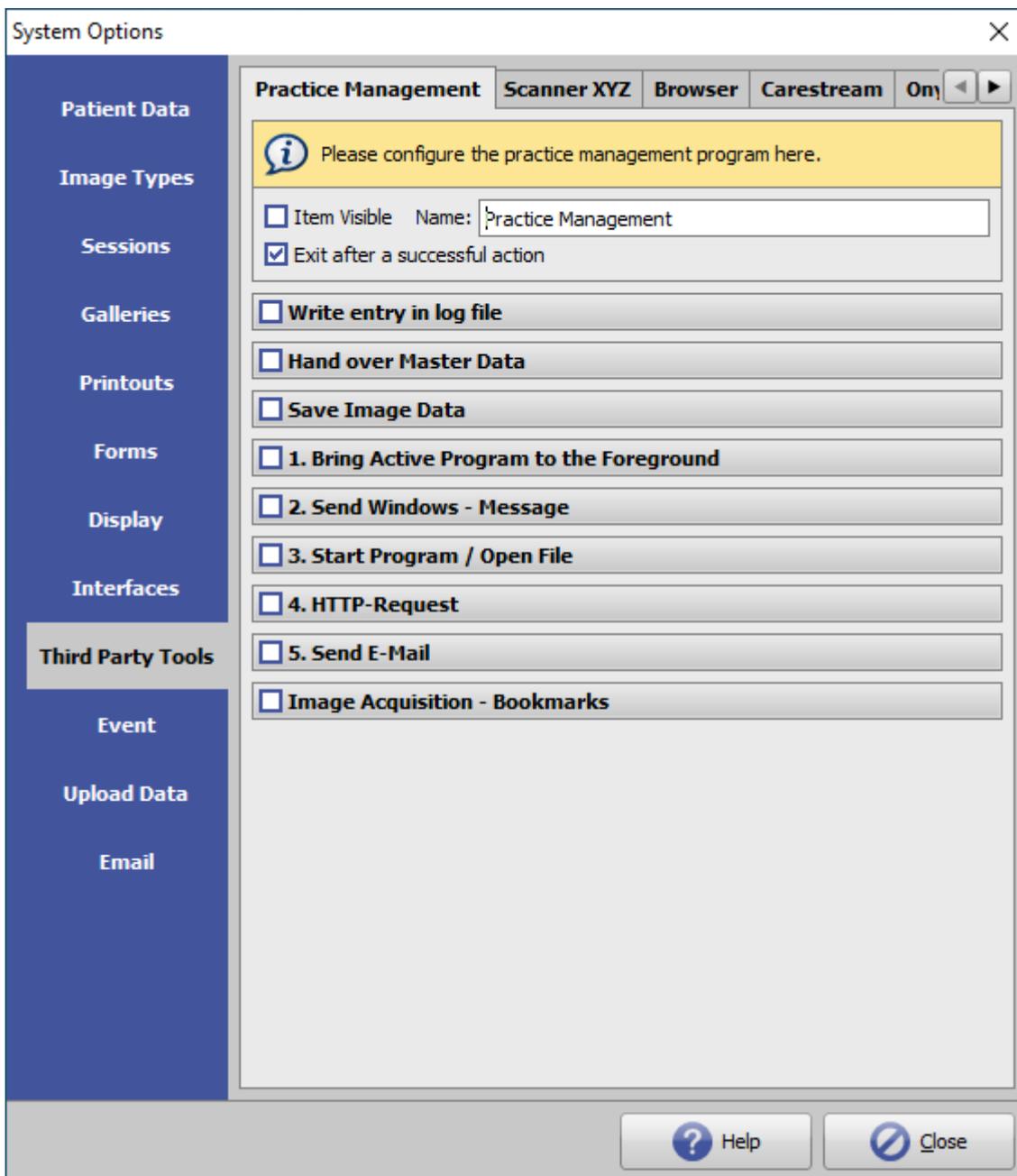

[Click auf Reiter öffnet zugehörigen Wiki-Seite]

Tools

Es können insgesamt 5 Drittprogramme konfiguriert werden, die sich über Hauptmenü [Gehe zu] aufrufen lassen. Jeder Aufruf bewirkt die darunter definierten optionalen Reaktionen. Ist Eintrag [Bildaufnahme - Lesezeichen] konfiguriert, erfolgt der Aufruf im Lesezeichen.Menü in Modul

Bild hinzufügen.

Optionen

Eintrag in Log-Datei schreiben
Stammdaten übergeben
Bilddaten sichern
1. Laufendes Programm in de Vordergrund bringen
2. Windows-Nachricht senden
3. Programm starten / Datei öffnen
4. HTTP-Anfrage
5. E-Mail senden
Bildaufnahme-Lesezeichen

Ist die Option [] **Nach erfolgreicher Aktion beenden** nicht aktiv, so werden alle aktiven Aktionen ausgeführt.

Ist die Option aktiv, so wird beginnend mit **1.** nach der ersten aktiven und erfolgreich ausgeführten Aktion die Abarbeitung beendet.

Reiter 1 ist für den Aufruf der Praxisverwaltungssoftware reserviert. Sichtbarkeit und Name des jeweiligen Menüeintrages können individuell festgelegt werden.

Beispiel



From:
<http://onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:
http://onyxwiki.net/doku.php?id=tab_thirdpartytools

Last update: **2023/08/25 12:45**

