

Interface TRIOS Scanner

Patientendaten (PVS)

Lt. Information von 3shape wird neben dem Kommandozeileninterface ab Release 1.7.19.1 auch die VDDS (PMS) Schnittstelle für die Dental Desktop-Software unterstützt. Das erlaubt (nur) die Übergabe von Patientendaten an Dental Desktop. Gleiches gilt für das Portal Unite.

Die Einstellungen werden [hier](#) beschrieben - bzgl. verfügbarer Updates bitte 3shape direkt kontaktieren.

Scandaten (BVS)

Seit 4. Quartal 2022 gibt es ein gemeinsames Entwicklungsprojekt mit 3shape, um aus OnyxCeph³™ heraus einen direkten Abruf der Scans zum Patienten aus Dental Desktop bzw. aus der Online-Plattform Unite zu ermöglichen. Leider ist diese Entwicklung aktuell noch nicht abgeschlossen, so dass TRIOS-Scans nach wie vor manuell in ein Patientenverzeichnis exportiert werden müssen.

Wir empfehlen, hierfür die [einfache Bildimport-Schnittstelle](#) über Lesezeichen zu benutzen.

From:

<https://www.onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:

https://www.onyxwiki.net/doku.php?id=trios_vdds

Last update: **2023/08/15 07:45**

