


Schnittstellenkonfiguration Digitalröntgen: VixWin

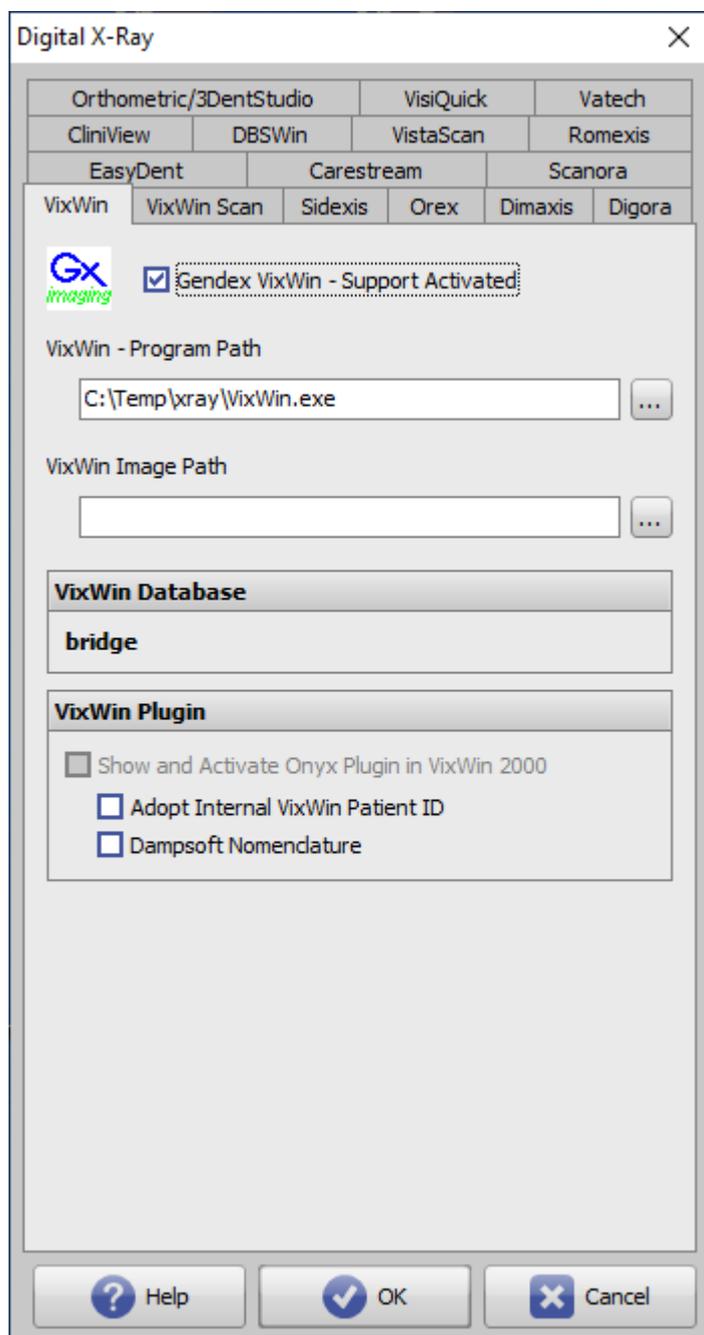

| Parameter | Einstellung |
|-------------------------------------|---|
| [Unterstützung aktiv] | Aktivierung der Importtaste im Modul Bild hinzufügen 2D |
| Programmpfad [...] | Lokaler Pfad zur ausführbaren Datei ..\VixWin.exe |
| Bildpfad [...] | Lokaler Pfad ..\VXIMAGES |
| [Plugin VixWin 2000] | PlugIn Bildübergabe aktivieren (wenn verfügbar) |
| [VixWin Patientennummer übernehmen] | Nummer des Patienten wird bei Übergabe übernommen |
| [Dampsoft Nomenklatur] | spezifische Dampsoft Nomenklatur wird übergeben |

From:
<https://www.onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:
<https://www.onyxwiki.net/doku.php?id=vixwin>

Last update: **2022/06/27 07:37**

