

Orthodontic-Seminars

Hinweise zu Installation und Nutzung der Software OnyxCeph^{3™}

Es wird angeboten, für das Webinar eine kostenlose Einzelplatz-Ausbildungslizenz der KFO-Software OnyxCeph^{3™} zu nutzen.

Die Installation sollte auf einem Notebook erfolgen, welches für die gesamte Kursdauer zur Verfügung steht und welches die nachfolgend beschriebenen Voraussetzungen erfüllt, um darauf ohne Probleme mit der Software arbeiten zu können.



Bitte beachten: Es wird nur **eine** Einzelplatz-Freischaltung pro Kursteilnehmer zur Verfügung gestellt! Anforderungen für mehrere Computer werden nicht bearbeitet. Stellen Sie also bitte sicher, dass die initiale Installation auf einem bzgl. Systemanforderungen geeigneten und für die gesamte Kursdauer verfügbaren Notebook oder PC erfolgt.

Voraussetzungen

Details

Betriebssystem

OnyxCeph^{3™} läuft auf allen aktuellen Windows[™]-Betriebssystemen. Sie sollten also Windows[™] 10 oder Windows[™] 11 verwenden. Wenn Sie ein MacBook benutzen wollen, dann muss auch darauf ein aktuelles Windows[™] installiert und über Bootcamp startbar sein. Von der Installation und Nutzung unter Parallels wird aus Performancegründen abgeraten.

Computermaus

Für die praktische Arbeit mit OnyxCeph^{3™} ist die Verwendung einer 2D Computermaus (möglichst mit Mausrad) als Eingabegerät unverzichtbar. Eine 3D-Maus (z.B. [SpaceMouse](#) von 3Dconnexion) kann hilfreich sein, ist aber nicht erforderlich.

Grafikkarte

Die 3D-Funktionen in OnyxCeph^{3™} benutzen OpenGL Version 4. Optimal hierfür ist eine externe GeForce Grafikkarte von NVIDIA oder anderen Herstellern. Mit einigen Einschränkungen im Hinblick auf Performance können auch Notebooks mit Intel-OnBoard-Grafik benutzt werden. Wichtig ist jedoch, dass die jeweilige Grafik über den aktuellsten Treiber verfügt. Bitte beachten Sie für das Update des Grafiktreibers diese [Hinweise](#).

Installation

Details

Installieren Sie auf dem Notebook die aktuelle Version der Software OnyxCeph^{3™}. Benutzen Sie hierfür folgenden Downloadlink (gültig bis 17.01.2023):

Downloadlink

Sollte der Downloadlink bereits abgelaufen sein, beantragen Sie unter ►[Download-Anforderung](#) einen neuen.

Entpacken Sie die heruntergeladene ZIP-Datei und rufen von dort aus den Installer OnyxCDMenu.exe auf, um nacheinander die Installation der lokalen Datenbank (Server installieren) und des lokalen Arbeitsplatzes (Client installieren) auszuführen. Eine ausführliche Anleitung der Installation finden Sie hier: ►[Installationshinweise](#).

Sollte auf dem Notebook schon eine Version der Software OnyxCeph^{3™} installiert sein, können Sie diese über das Programm Onyx3Config online aktualisieren oder hierzu ebenfalls den oben angegebenen Downloadlink verwenden.

Bitte beachten Sie auch, dass für Neuinstallationen und Updates von Programmen unter Windows™ immer Administrator-Berechtigungen benötigt werden.

Aktivierung

Details


Rufen Sie nach dem ersten Start von OnyxCeph^{3™} über Menüpunkt [Optionen|Registrieren] das Programm [OnyxRegister](#) auf.

Tragen Sie im **Schritt 1 Ihre persönlichen Daten** ein. Als Praxisname verwenden Sie bitte

Webinar Traben Trarbach


(**Groß-/Kleinschreibung beachten; ohne zusätzliche Leerzeichen vor, innerhalb oder nach dem Praxisname**).

Im **Schritt 2** muss dann die Prüfsumme CRC = **9500** und die die Schlüsselversionsnummer Version = **72** angezeigt werden. Ist das nicht der Fall, prüfen Sie bitte nochmals die korrekte Schreibweise des Praxisnamens in Schritt 1.

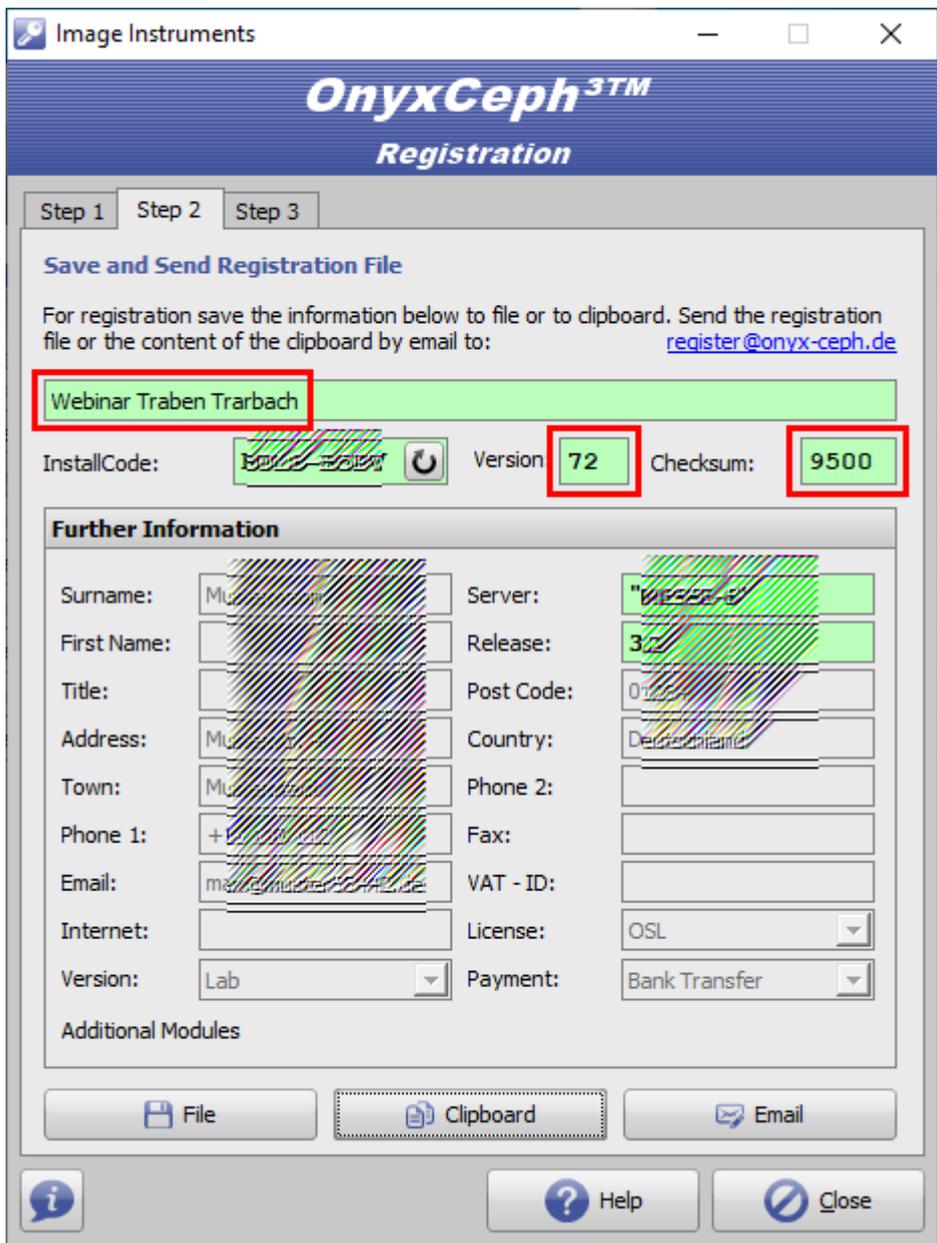

Klicken Sie anschließend auf Taste **[Email]** unten rechts, um den Freischaltcode für Schritt 3 anzufordern. Verfügt das Notebook nicht über eine Internetverbindung, dann speichern Sie die Lizenzanforderung mit Taste **[Datei]** unten links als Datei und senden diese als E-Mail-Anhang an support@onyx-ceph.de.

An die in Ihrer Registrierung hinterlegte E-Mail-Adresse erhalten Sie dann den Freischaltcode für **Schritt 3**, den Sie über Zwischenablage einfügen können. Der Freischaltcode wird bei Image Instruments manuell generiert, weshalb zwischen Anforderung und Bereitstellung des Schlüssels je nach Zeitzone im Ausnahmefall mehrere Stunden liegen können.

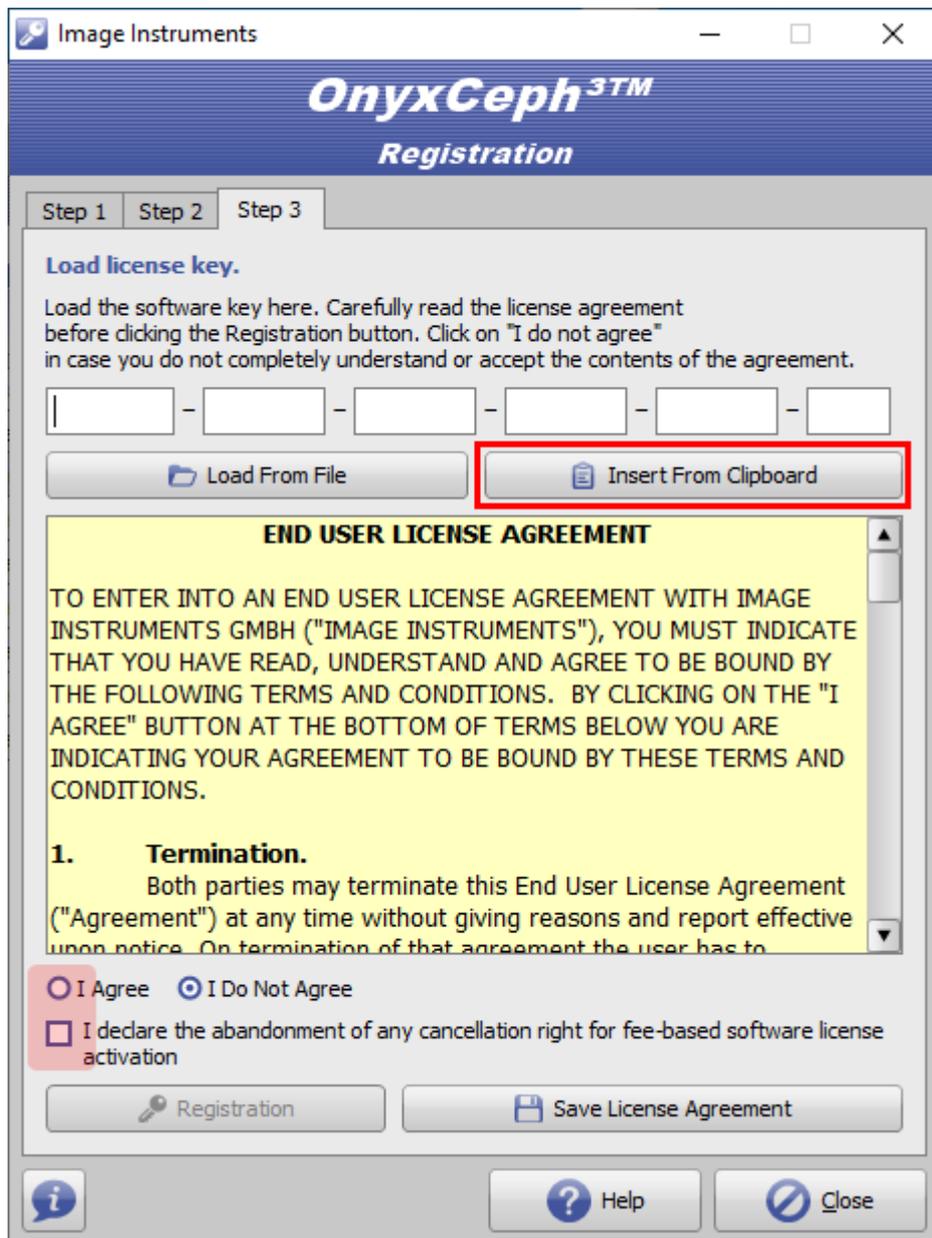

Bestätigen Sie die Lizenzbedingungen und die Widerrufsbelehrung und starten Sie die Aktivierung mit Taste **[Registrieren]**.

Bitte beachten Sie, dass die Registrierung nur abgeschlossen werden kann, wenn Sie das Hauptprogramm OnyxCeph^{3™} zuvor geschlossen haben. Eine Animation zur Durchführung der Aktivierung finden Sie hier: [Lizenz-Aktivierung](#).

Funktionsumfang

Um sich möglichst umfangreich mit den Möglichkeiten und Vorteilen der digitalen Umsetzung von Arbeitsabläufen im KFO-Alltag vertraut machen zu können, beinhaltet die Kurslizenz eine Vielzahl der optional angebotenen Auswertungs- und Planungsmodule. Eine Verwendung der Webinar-Lizenz darf nur für Ausbildungszwecke erfolgen.

Hinweise

Ausführliche Informationne zur Software finden Sie hier im [OnyxWiki](#).

Wir möchten Sie bitten, die beschriebenen Vorbereitungen möglichst rechtzeitig vor Kursbeginn durchzuführen, da während des Webinars keine Zeit für Installation und Freischaltung zur Verfügung stehen wird.

From:
<http://onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:
<http://onyxwiki.net/doku.php?id=wtt&rev=1674112668>

Last update: **2023/01/19 08:17**

