



Kombinierte Kronenbewegungen

Virtuelle Bewegungen einzeln oder mehrfach ausgewählter Kronen werden in OnyxCeph³™ längs der bzw. um die beim Segmentieren zugewiesenen **Kronenkoordinatenachsen** kontrolliert.


Echte Zahnbewegungen erfolgen stets in Kombination mehrerer dieser Komponenten/Freiheitsgrade erfolgen. Diese Kombination ist aber von Parametern abhängig, die das System nicht reproduzierbar/eindeutig kennt bzw. zuordnen kann – z.B. die kronenindividuell unterschiedliche Lage des “Rotationspunktes” für Protrusion. Solche Kombinationen muss der Anwender durch separate Einstellung der Komponenten umsetzen. Abweichend davon lassen sich Einzel- und Gruppenbewegungen in bestimmten Fällen in zusammengefasst und/oder in View-Koordinaten steuern.

Bei Mehfauswahl wird die Steuerung auf alle Kronen der Gruppe individuell angewandt.

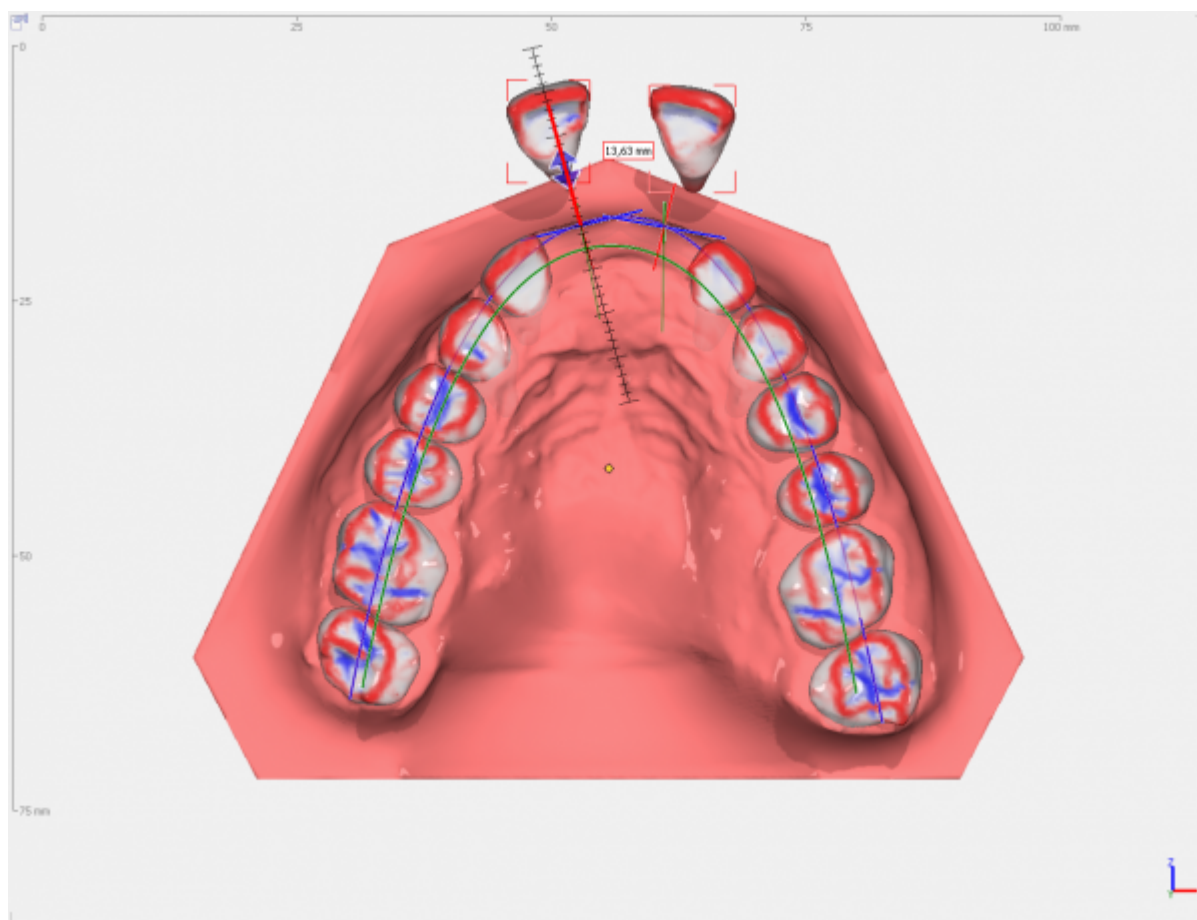


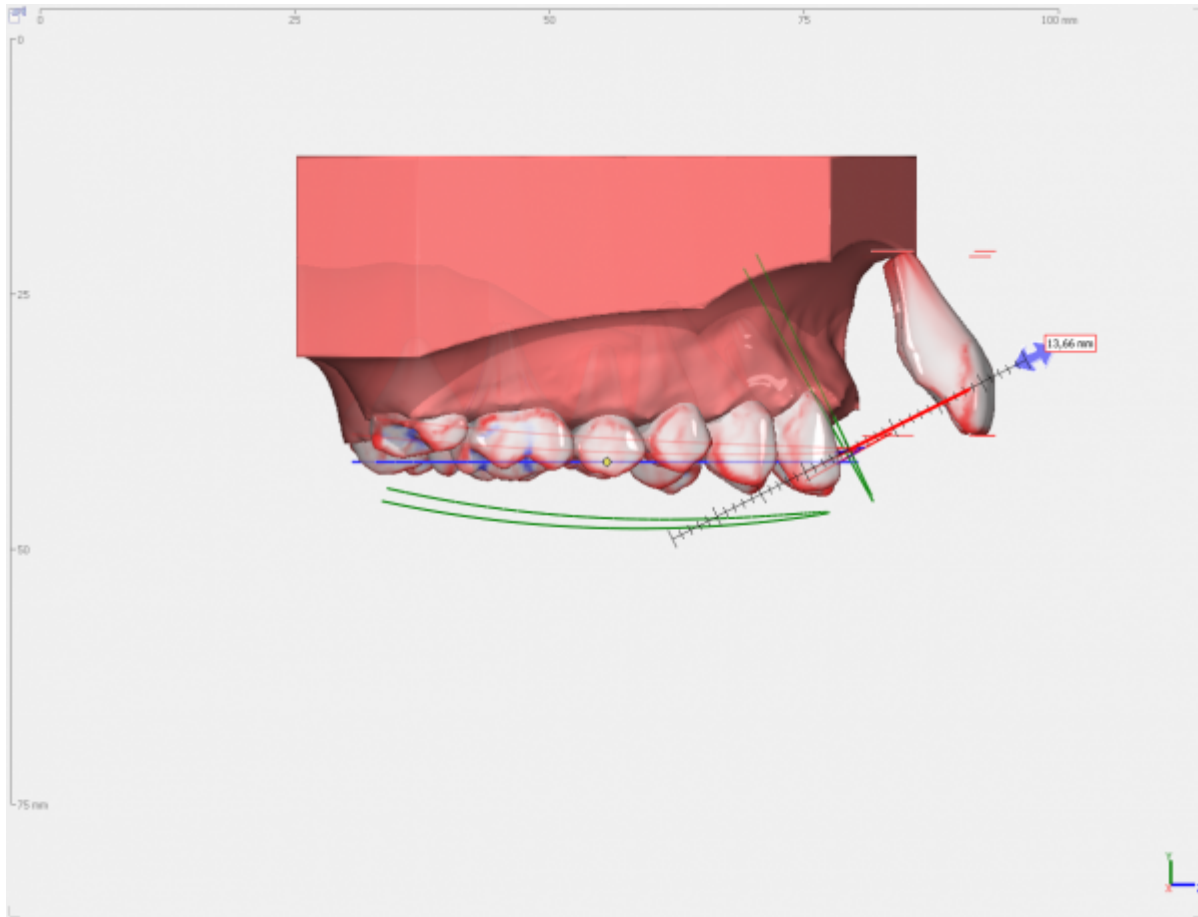

Wird gleichzeitig die STRG-Taste gedrückt, wird die okklusale Komponente (Bewegung längs Zahnachse) ignoriert.

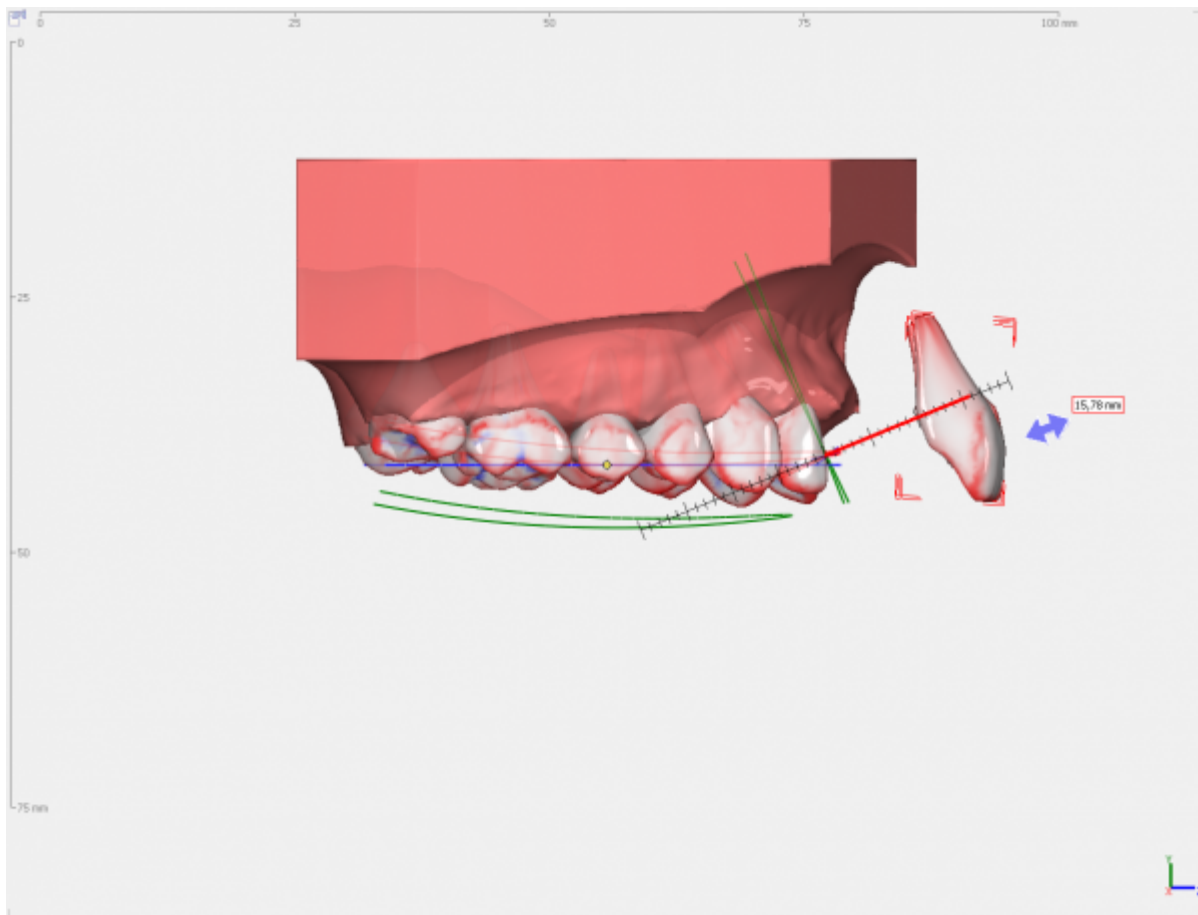

Das Drücken der SHIFT-Taste bei Mehrfachauswahl bewirkt, dass die Steuerung der Gruppenbewegung das Koordinatensystem der ersten Krone in der Reihenfolge der Zahnnummern auf die "verblockte" Gruppe anwendet.

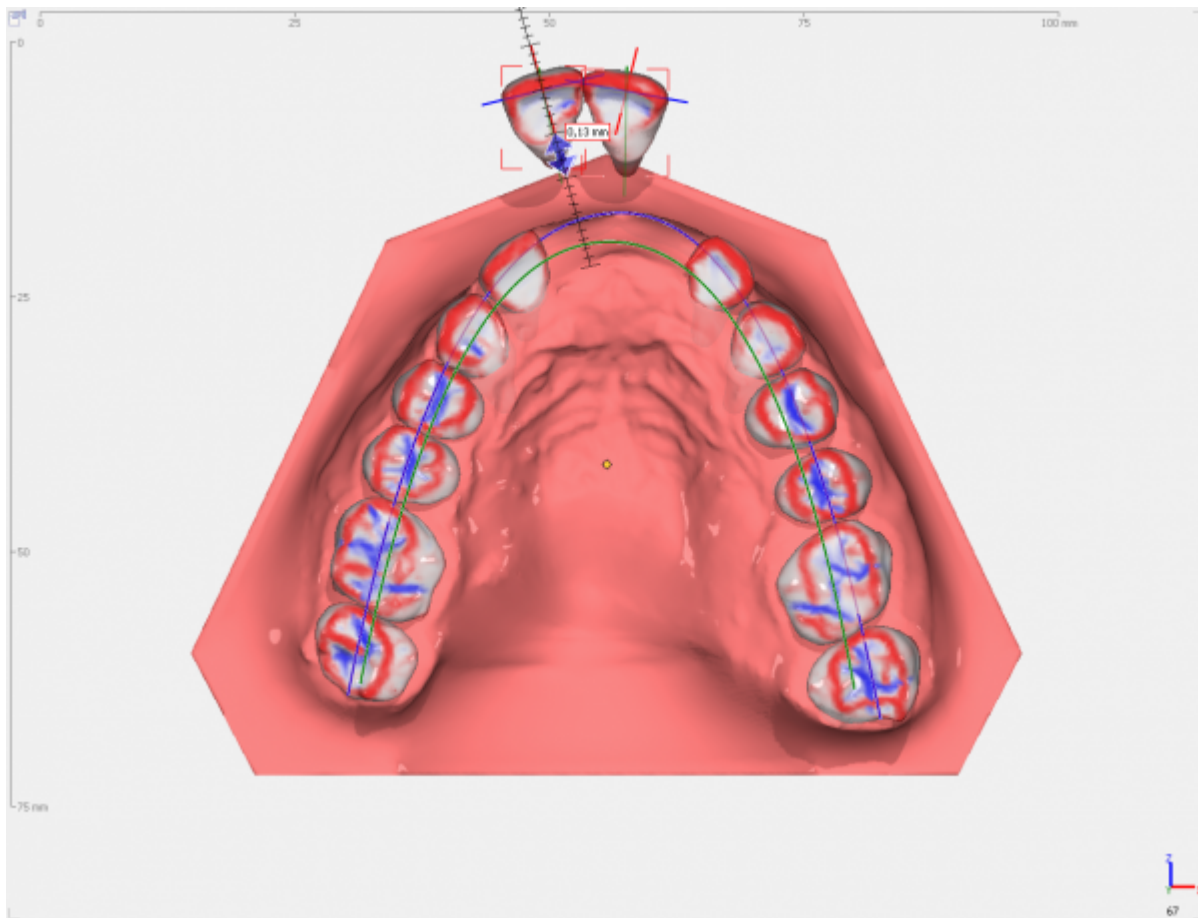

From:

<http://www.onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:

<http://www.onyxwiki.net/doku.php?id=20180406012>

Last update: **2018/04/06 15:02**

