

#3424 Wiederholter Aufruf 3D-Modul Segmentieren

Ab Release 3.2.31 kann 3D-Modul [Segmentieren](#) mit verschiedenen aus diesem Modul gespeicherten Zwischenbefunden (z.B. nach Teilschritt Segmentieren, Teilschritt Komplettieren) erneut gestartet werden.

Wird 3D-Modul [Segmentieren](#) mit einem nach Teilschritt 1 (Segmentieren) gespeicherten Befund erneut geöffnet, kann dort fortgesetzt werden.

Wird das Modul mit einem nach Teilschritt 3 (Komplettieren) gespeicherten Befund erneut geöffnet, kann (nach nochmaligem Anklicken der Taste Komplettieren) dort fortgesetzt werden, indem aus dem Kontextmenü der Zahnliste rechts die Einträge.

- Alternative Krone
- Manuelle Korrektur

benutzt werden.

From:
<https://onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:
<https://onyxwiki.net/doku.php?id=3424>

Last update: **2015/10/05 21:47**

