


#3832 Tastatursteuerung Kronennavigator

Ab Versionen > 3.2.52 kann die grafische Navigator-Komponente (Kronennavigator, Bracketnavigator, Attachmentnavigator) zusätzlich zur Bedienung per Mausclicks auch über Tastaturkommandos gesteuert werden. Folgende Kommandos sind verfügbar:

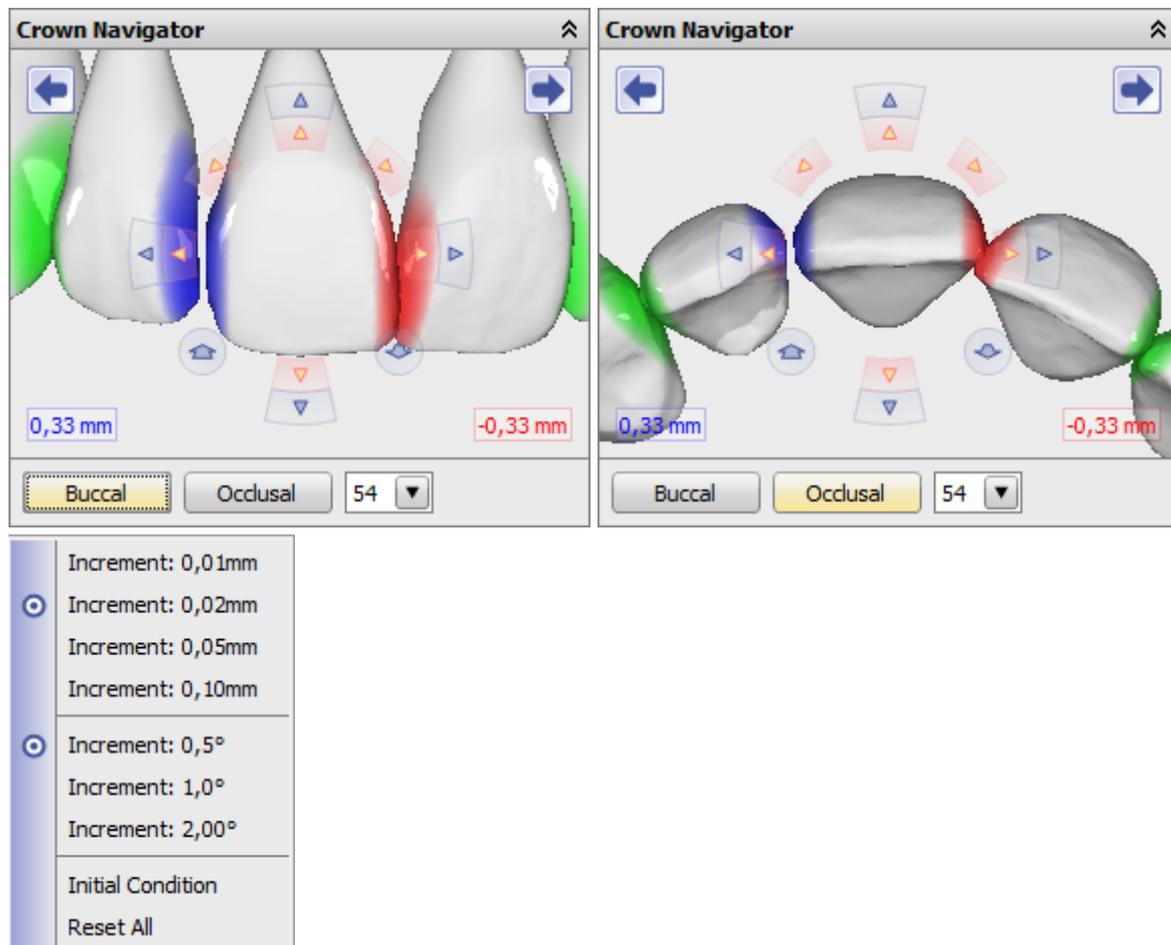

Ziffernblock	
[0]/[Einfg]	Ansichtsrichtung wechseln (z.B. okklusal / bukkal)
[2]/[8]	Rotation um X-Achse - ohne [Num] oder mit [Shift]: Translation entlang Y-Achse
[4]/[6]	Rotation um Y-Achse - ohne [Num] oder mit [Shift]: Translation entlang X-Achse
[7]/[9]	Rotation um Z-Achse
[1]/[3]	Translation entlang Z-Achse
[+]/[-]	Nächster/Vorheriger Zahn
Cursortasten	
[←]/[→]	Translation entlang X-Achse
[↑]/[↓]	Translation entlang Y-Achse
Funktionstasten ¹	
[F2]	Einzelansicht Oberkiefer (okklusal)
[F3]	Einzelansicht Unterkiefer (okklusal)
[F4]	4er-Ansicht
[F5]	Einzelansicht Ober- und Unterkiefer (frontal)
[F6]	6er-Ansicht
Sonstige ¹	

Ziffernblock	
[Ctrl]+[1]	Oberkiefer und Unterkiefer in allen Ansichten anzeigen
[Ctrl]+[2]	nur Oberkiefer in allen Ansichten anzeigen
[Ctrl]+[3]	nur Unterkiefer in allen Ansichten anzeigen

¹ Unabhängig von der Fokussierung des Kronennavigators

Hinweis
Momentan werden keine Tastaturbefehle weitergeleitet, solange irgendein 3D-View fokussiert ist. Als Zwischenlösung muß vorerst noch ein anderes Steuerelement (z.B. die Objektliste) fokussiert werden.

From:
<http://www.onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:
<http://www.onyxwiki.net/doku.php?id=3832>

Last update: **2021/06/25 16:08**

