

Online Bracketbibliothek


Ab Release 3.2.100 (233) kann die lokale Bracketbibliothek von lizenzierten Anwendern der Programmversionen


- OnyxCeph³™ 3D PRO
- OnyxCeph³™ LAB
- OnyxCeph³™ OMS

online abgeglichen und um online verfügbare Brackets erweitert werden.

Bibliothek öffnen

Der Aufruf erfolgt über Hauptmenüeintrag [Ansicht|Bracketbibliothek] oder Shortcut SHIFT+STRG+B

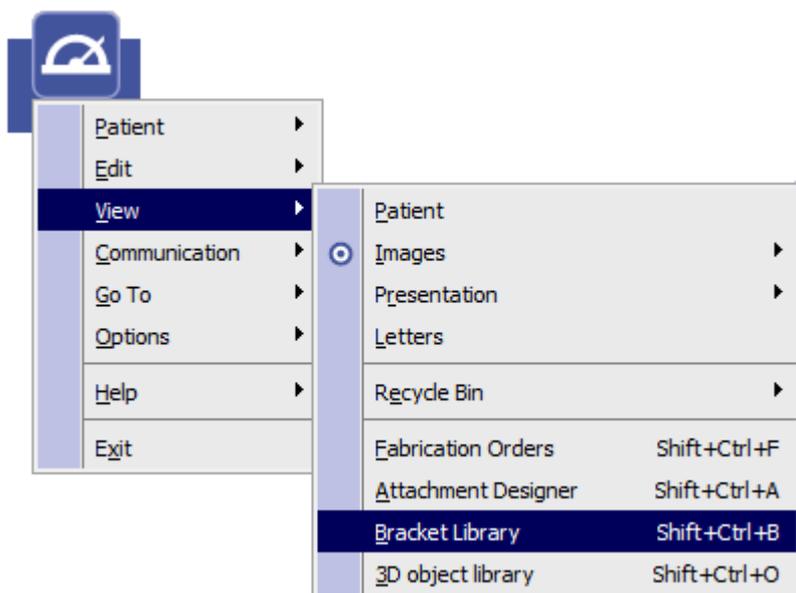

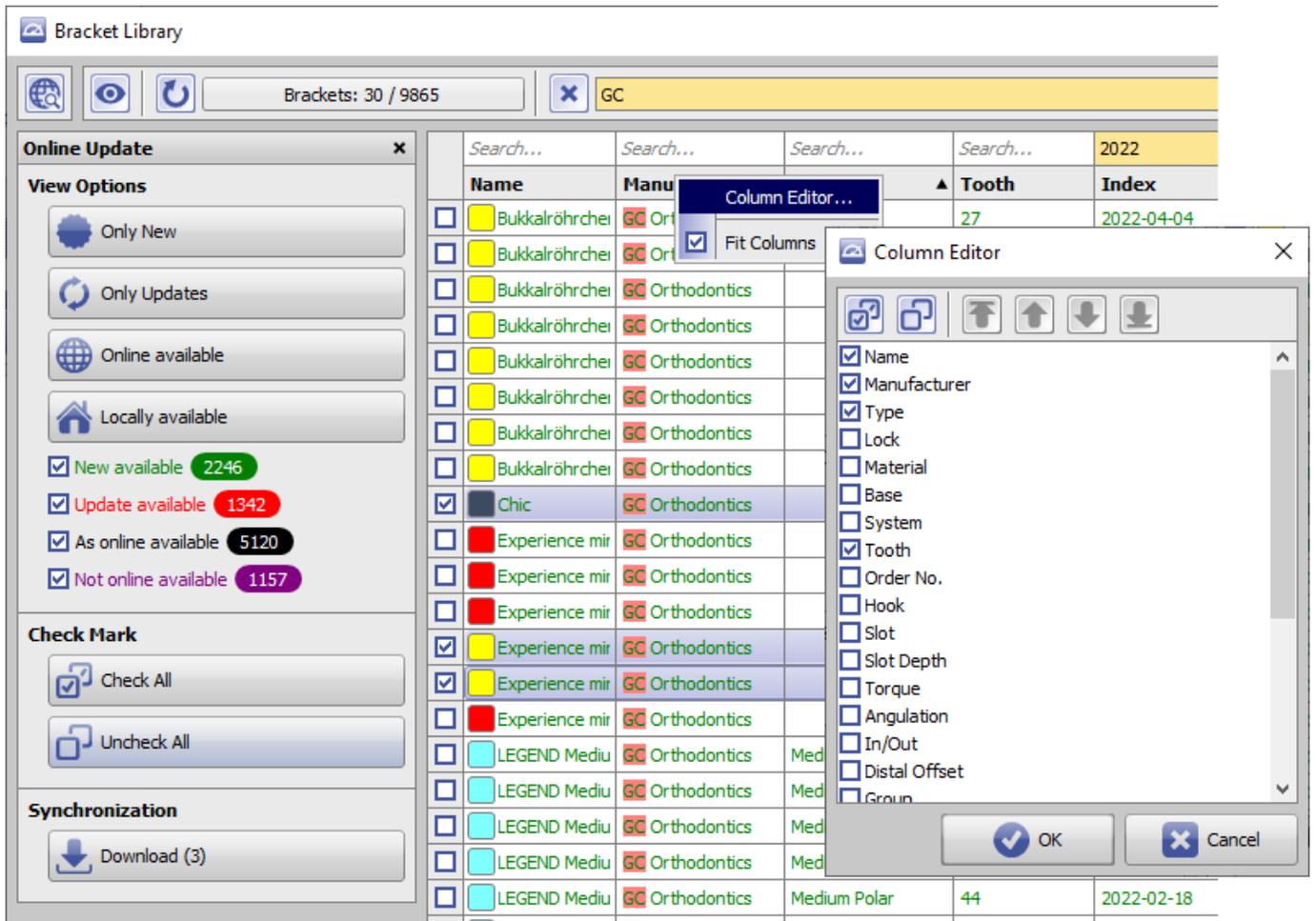

Die lokale Brackettabelle lässt sich mit Icon-Taste [Aktualisieren]  erneut einlesen. Mit Icon-Taste [Auf Updates prüfen]  kann der Datenbestand der Online Bracketbibliothek mit dem der lokalen Brackettabelle anhand der Datensatz-ID abgeglichen werden. Als Ergebnis des Vergleiches werden die auf beiden Seiten verfügbaren Bracket-Datensätze kategorisiert und dementsprechend farbcodiert:

Farbcode	Wo befinden sich die Bracket-Datensätze ?	Online	Lokal	Auswählbar für Download ?
2246	nur online	✓	✗	✓ ja
1342	online + lokal, unterschiedlich	✓	✓	✓ ja
5120	online + lokal, identisch	✓	✓	nein
1157	nur lokal	✗	✓	nein

Suche und Filter

Die Listenansicht aller Brackets kann im Panel [Ansichtsoptionen] mit Tasten und Checkboxes entsprechend dieser Kategorien gefiltert werden.

View Options

- Only New
- Only Updates
- Online available
- Locally available
- New available **2246**
- Update available **1342**
- As online available **5120**
- Not online available **1157**

Zusätzlich kann das Suchfeld oberhalb jedes Spaltenkopfes und das Volltext-Suchfeld über der Tabelle verwendet werden, um die Listenansicht auf die gewünschten Datensätze einzugrenzen. Mittel Kontextmenü über der Kopfzeile lassen sich die anzuzeigenden Spalten konfigurieren.

The screenshot shows a software interface with a search bar containing 'GC' and a table of dental data. The table has columns for Name, Manufacturer, Tooth, and Index. A context menu is open over the 'Tooth' column header, showing 'Column Editor...' and 'Fit Columns'. The 'Column Editor' dialog box is open, displaying a list of columns with checkboxes to select which ones to display. The 'Tooth' checkbox is checked.


Name	Manu	▲ Tooth	Index
Bukkalröhrchei	GC Ort	27	2022-04-04
Bukkalröhrchei	GC Ort		
Bukkalröhrchei	GC Orthodontics		

Column Editor

- Name
- Manufacturer
- Type
- Lock
- Material
- Base
- System
- Tooth
- Order No.
- Hook
- Slot
- Slot Depth
- Torque
- Angulation
- In/Out
- Distal Offset
- Group

Brackets herunterladen

Um Online verfügbare Brackets (grün oder rot markiert) in die lokale Brackettabelle herunterzuladen, muss die Checkbox links vom jeweiligen Listeneintrag aktiviert werden. Mit den Tasten [Alle auswählen] und [Keine auswählen] kann diese Aktivierung für alle in der Liste angezeigten Datensätze gleichzeitig erfolgen bzw. aufgehoben werden:

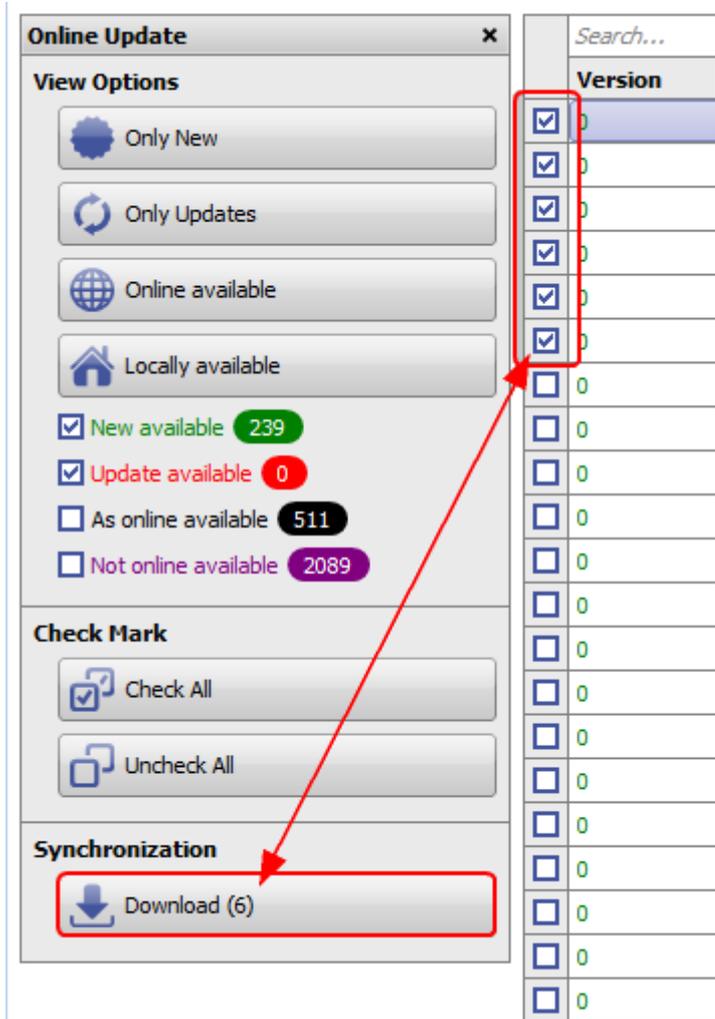

Verweise

- [W Brackets/Attachments herunterladen](#)
- [W Import-Anforderungen für Bracketdateien](#)

From:
<http://www.onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:
<http://www.onyxwiki.net/doku.php?id=3948>

Last update: **2023/07/12 07:51**

