

#4539 Funktionstasten Alignermodul

Ab Release 3.2.90 (209) können im Modul [Aligner 3D](#) folgende erweiterte Funktionstasten genutzt werden:

- F8: Gehe zum nächsten Grenzwert OK/UK
- SHIFT+F8: Gehe zum nächsten Grenzwert OK
- STRG+F8: Gehe zum nächsten Grenzwert UK
- F9: Neuer Status
- F10: Kollisionen ausgleichen

Damit lassen sich die Behandlungsschritte (Steps) bei vorgegebenem Behandlungsziel und vordefinierten Grenzwerten für die Zahnbewegungen durch die mehrfache Anwendung der Tastenfolge [SHIFT]STRG+]F8+F9+F10 festlegen, wenn die manuellen Korrekturen je Behandlungsschritt auf den Ausgleich von Kronenkollisionen beschränkt werden können.
Bei F10 beachten, dass Kollisionen nur innerhalb der in der Objektliste markierten Kronen ausgeglichen werden.

From:
<http://www.onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:
<http://www.onyxwiki.net/doku.php?id=4539>

Last update: **2017/10/22 11:41**

