


# HTTP-Anfrage

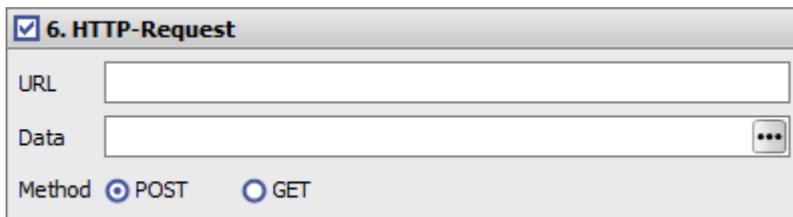

6. HTTP-Request

URL

Data  ...

Method  POST  GET

## Parameter URL

Nach URL kann eine HTTP-Adresse angegeben werden. Diese wird aufgerufen, wenn das Tool gestartet wird oder das Ereignis auftritt. Die Verwendung von Platzhaltern ist möglich.

```
http://localhost:9000/SETPAT -Client=%F -SelectImage="%7"
```

Es wird folgende HTTP-Anfrage abgeschickt:

```
http://localhost:9000/SETPAT -Client=15 -SelectImage="10000R6I6"
```

Der Empfänger muss diesen Aufruf entgegennehmen und interpretieren.

## Parameter Daten

Im Feld Daten kann eine Text-Datei konfiguriert werden. Diese wird mit dem HTTP-Request übertragen. Auch hier ist die Verwendung von Platzhaltern möglich. So kann zum Beispiel eine JSON- oder XML-Datei mit Patientendaten gefüllt und dann verschickt werden.


Beispiel: Bei folgender JSON-Datei-Vorlage:

```
{  
  "patientId" : "%0" ,  
  "patientFirstName" : "%3"  
}
```

wurde folgender Text übertragen:

```
{  
  "patientId" : "10000" ,  
  "patientFirstName" : "Petra"  
}
```

Der Empfänger muss diese Datei entgegennehmen und interpretieren.

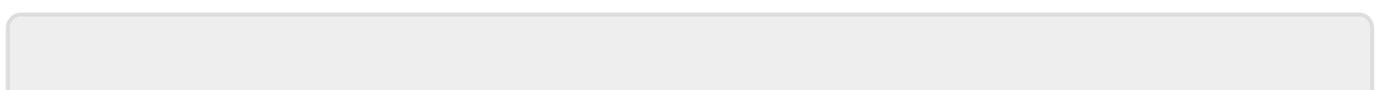

From:  
<https://www.onyxwiki.net/> - [OnyxCeph<sup>3</sup>™ Wiki]

Permanent link:  
<https://www.onyxwiki.net/doku.php?id=6httprequest>

Last update: **2021/08/13 15:44**

