

Modul Bild hinzufügen 3D



Programmversion	BASIC	2D PRO	3D PRO	LAB	OMS
Verfügbarkeit					


nicht
 enthalten
 immer
 enthalten
 optional
 enthalten

In Modul Bild hinzufügen 3D können 3D Datensätze von verschiedenen Quellen importiert, [Sitzungen](#) und [Bildtypen](#) zugeordnet, datiert, mit [Bildattributen und Bildkommentaren](#) versehen und in der Onyx-Datenbank gespeichert werden.

Erste Schritte

1. Quelle wählen
2. Zum neuen Befund gehörige Dateien gemeinsam in eine Sitzung ziehen
3. Bildtyp wählen und auf den neuen Befund ziehen
4. Befund zum Ausrichten doppelklicken
5. Änderungen speichern

Moduloberfläche

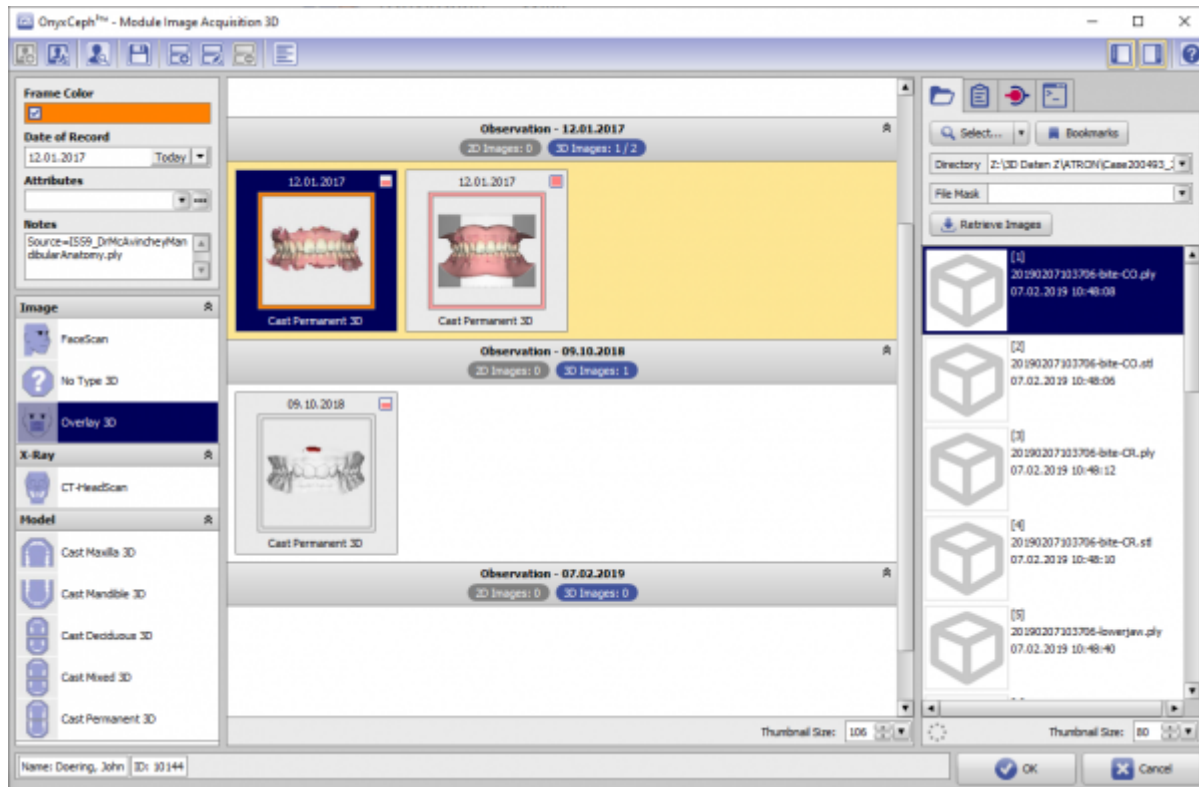

Verweise

-  [Modul-Handout Bildimport 3D](#)
-  <https://youtu.be/TAAGkmFIKd4>
-  <https://youtu.be/Q9R9V5QgEoE>
-  [Scan importieren und ausrichten](#)

From:
<https://onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:
https://onyxwiki.net/doku.php?id=add_image_3d

Last update: **2023/03/09 15:33**

