

Modul Aligner 3D: Revision 3.2.169

Attachmentliste

Die Attachment-Liste in Modul [Aligner 3D](#) wurde an Release 3.2.157+ visuell und funktionell leicht überarbeitet:


	New Point	
	Tooth 16	
	Tooth 15	
	Tooth 14	
	Tooth 13	
	Tooth 12	
	Tooth 11	_Onyx_1
	Tooth 21	
	Tooth 22	
	Tooth 23	_Onyx_0
	Tooth 37	
	Tooth 36	_Onyx_0
	Tooth 35	
	Tooth 34	_Onyx_11_a/i (2I)
	Tooth 33	_Onyx_06 (2I)
	Tooth 32	
	Tooth 31	
	Tooth 41	
	Tooth 42	Box 3 x 2 mm (2I)
	Tooth 43	_Onyx_2R (2I)
	Tooth 44	
	Tooth 45	
	Tooth 46	

- Neue Punkte (für zusätzliche Attachments) können jetzt für alle Schritte angelegt werden - wahlweise für
 - alle Schritte
 - alle Schritte von 0 bis zum aktuellen Schritt
 - alle Schritte vom aktuellen Schritt bis zum Planungsziel
- Das Löschen von Punkte kann ebenfalls selektiv erfolgen für
 - alle Schritte
 - alle Schritte von 0 bis zum aktuellen Schritt
 - alle Schritte vom aktuellen Schritt bis zum Planungsziel
- neue Punkte werden beim Kopieren berücksichtigt
- Menüpunkte im Kontextmenü der Attachmentliste wurden nach Priorität geordnet
- bei Initialisierung der Attachmentliste werden nicht segmentierte Kronen ausgelassen
- Spalte Hersteller ausgeblendet

- Attachment-Farbe wird dargestellt
- visuelle Trennung zwischen den Zahnbogen-Quadranten

Zeitleiste

Zusätzlich zur Individualisierung von Name und Kommentar eines Aligner-Planungsschrittes kann den Step-Markierungen nun eine Farbe zugewiesen werden.

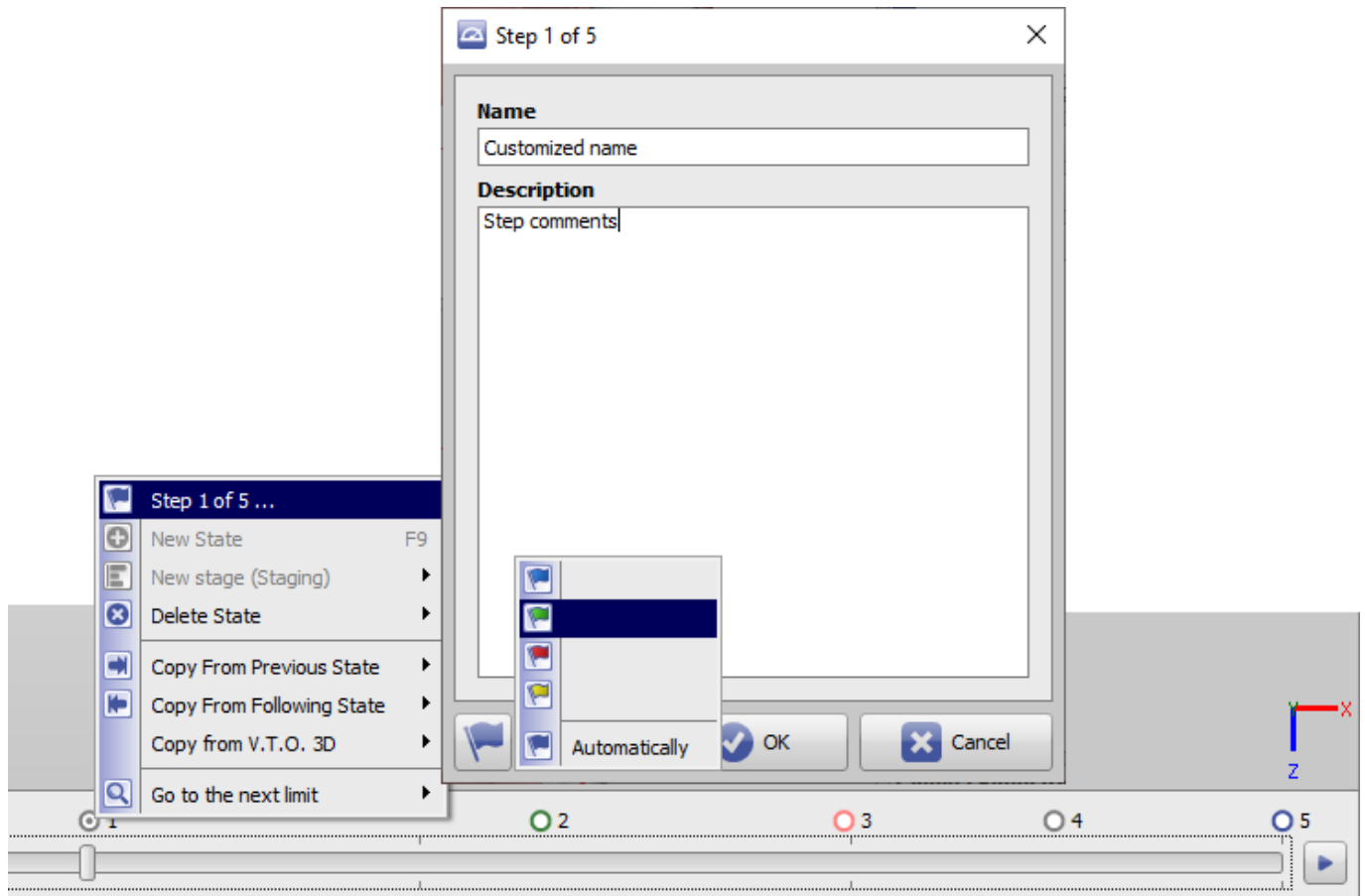

Das Feature kann z.B. genutzt werden, um Stages und Steps visuell voneinander zu unterscheiden.

From:

<http://www.onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:

<http://www.onyxwiki.net/doku.php?id=attmtlist>

Last update: 2021/11/30 08:56

