

# Modul Modellausrichtung



| Programmversion | BASIC | 2D PRO | 3D PRO | LAB | OMS |
|-----------------|-------|--------|--------|-----|-----|
| Verfügbarkeit   | ✗     | ✗      |        |     |     |

✗ nicht  
enthalten

immer  
enthalten


optional  
enthalten

Modul Modellausrichtung ermöglicht eine Neu-Ausrichtung der Kieferrelation eines Scan-Datensatzes nach unterschiedlichen Vorgaben und das Anbringen verschiedener Arten von Modellsockel (EU-, US-, Platten-, Hufeisensockel) nach manueller Definition der Trimmlinie. Das so erzeugte Studienmodell muss als separater befund abgespeichert werden.

## Erste Schritte

1. Modul mit Scan in Okklusion öffnen
2. Optional: auf Tab |Artikulator|, |Kieferrotationsachse| oder |Kiefer ausrichten| Kieferrelation anpassen
3. Auf Tab |Beschneiden| mit Rechtsklicks Trimmlinie für Oberkiefer und Unterkiefer definieren
4. Längs Trimmlinie beschneiden
5. Auf Tab |Sockel| Sockeltyp auswählen und mit Scan verbinden
6. Studienmodell als Befund speichern

## Moduloberfläche

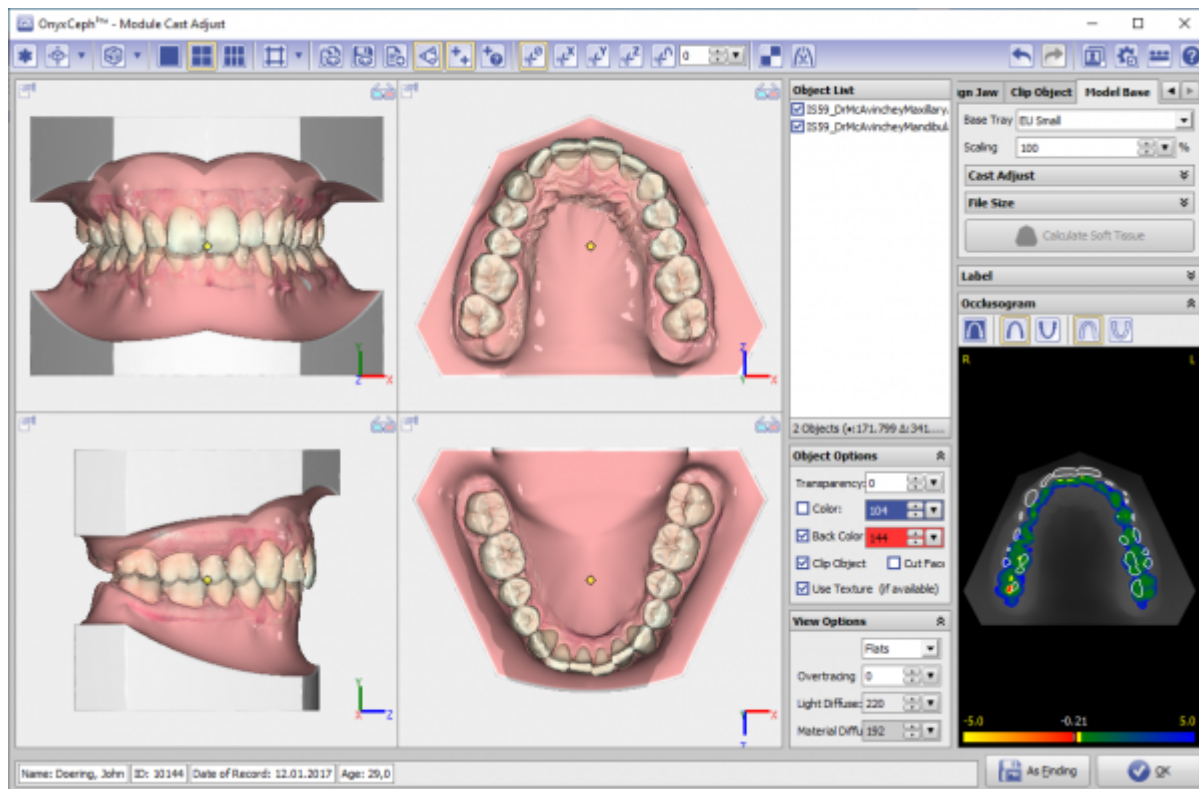

## Verweise

|                                                                                     |                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <a href="#">Modul-Handout Modellausrichtung</a>                                                                                           |
|  | <a href="https://youtu.be/TAAGkmFIKD4">https://youtu.be/TAAGkmFIKD4</a>                                                                   |
|  | <a href="https://drive.google.com/open?id=0B5nAIDRchl5WakJBYXJ2QWNFSXM">https://drive.google.com/open?id=0B5nAIDRchl5WakJBYXJ2QWNFSXM</a> |

From:  
<https://www.onyxwiki.net/> - [OnyxCeph<sup>3</sup>™ Wiki]

Permanent link:  
[https://www.onyxwiki.net/doku.php?id=base\\_tray](https://www.onyxwiki.net/doku.php?id=base_tray)

Last update: **2023/03/09 15:31**

