

Modul Kombinieren 2D



Programmversion	BASIC	2D PRO	3D PRO	LAB	OMS
Verfügbarkeit					


nicht
 enthalten
 immer
 enthalten
 optional
 enthalten

Mit Modul Kombinieren 2D können zwei Bilder mit unterschiedlichen, aber überlappenden Inhalten miteinander kombiniert werden. Dabei wird das zweite Bild hinter dem ersten Bild komplett oder in einer vorgegebenen Region anhand gemeinsamer Referenzpunkte mit wählbarer Transparenz eingeblendet. Zusätzlich kann die Durchzeichnung eines der beiden Bilder überlagert werden.

Erste Schritte

1. Modul mit 2 Bildern öffnen
2. Korrespondierende Punkte wählen/setzen
3. Überlagerungsregion definieren
4. Auf Reiter |Kombinieren| wechseln
5. Überlagerung optional modifizieren
6. Überlagerung als Projekt und/oder Befund speichern

Moduloberfläche

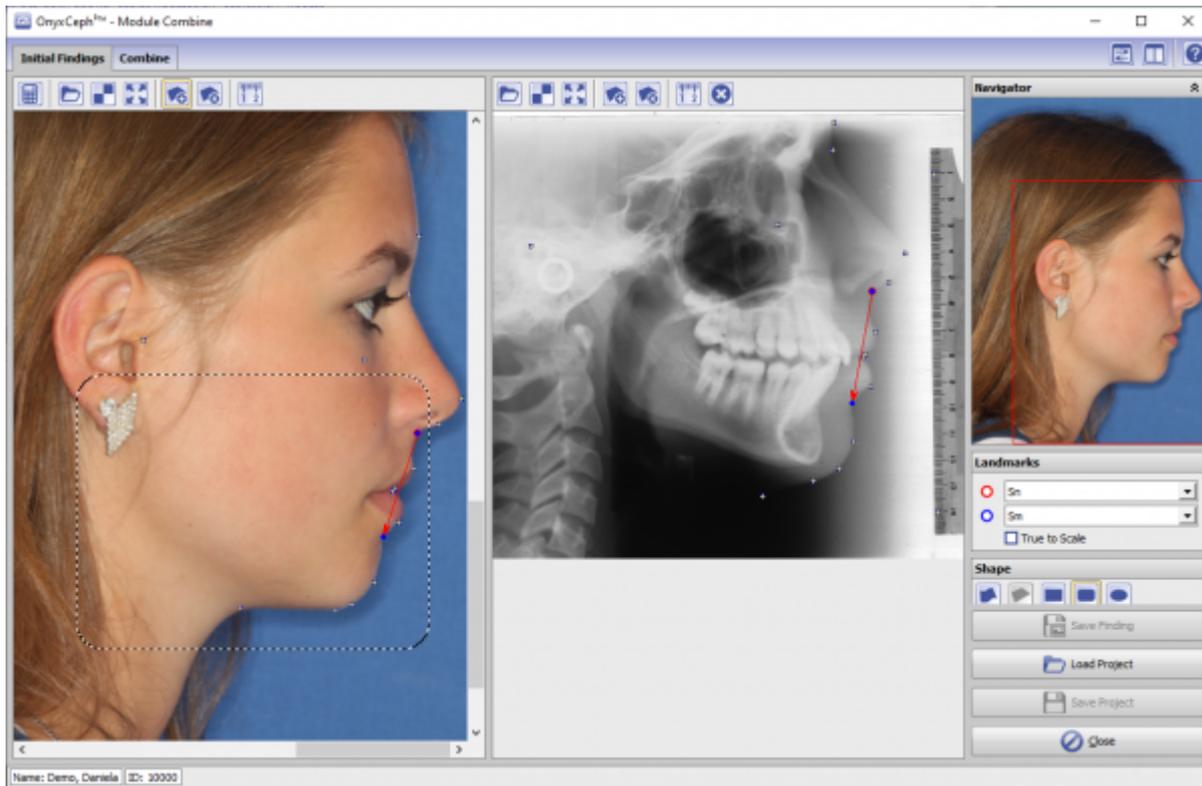

Verweise



From:
<http://www.onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:
http://www.onyxwiki.net/doku.php?id=combine_2d

Last update: **2023/03/06 12:51**

