

Modul Kombinieren | Register 3D



Programmversion	BASIC	2D PRO	3D PRO	LAB	OMS
Verfügbarkeit	✗	✗	🏠	🏠	🏠

- ✗

enthalten

nicht
- 🏠

enthalten

immer
- 🏠

enthalten


optional

Modul Kombinieren 3D erlaubt in den beiden separat anwendbaren Modi [Kombinieren] und [Registrieren] die Fusion von zwei 3D-Befunde anhand überlappender Merkmale, um anhand der Kombination zusätzliche Möglichkeiten für Visualisierung, Diagnostik oder Planung zu eröffnen.

Erste Schritte

1. Modul mit 2 Befunden öffnen
2. Korrespondierende Referenzpunkte setzen
3. Für ICP-Registrierung, Oberflächenbereich markieren
4. Auf Reiter |Kombination| wechseln und Ergebnis konfigurieren
5. Ergebnis als Befund speichern

Moduloberfläche

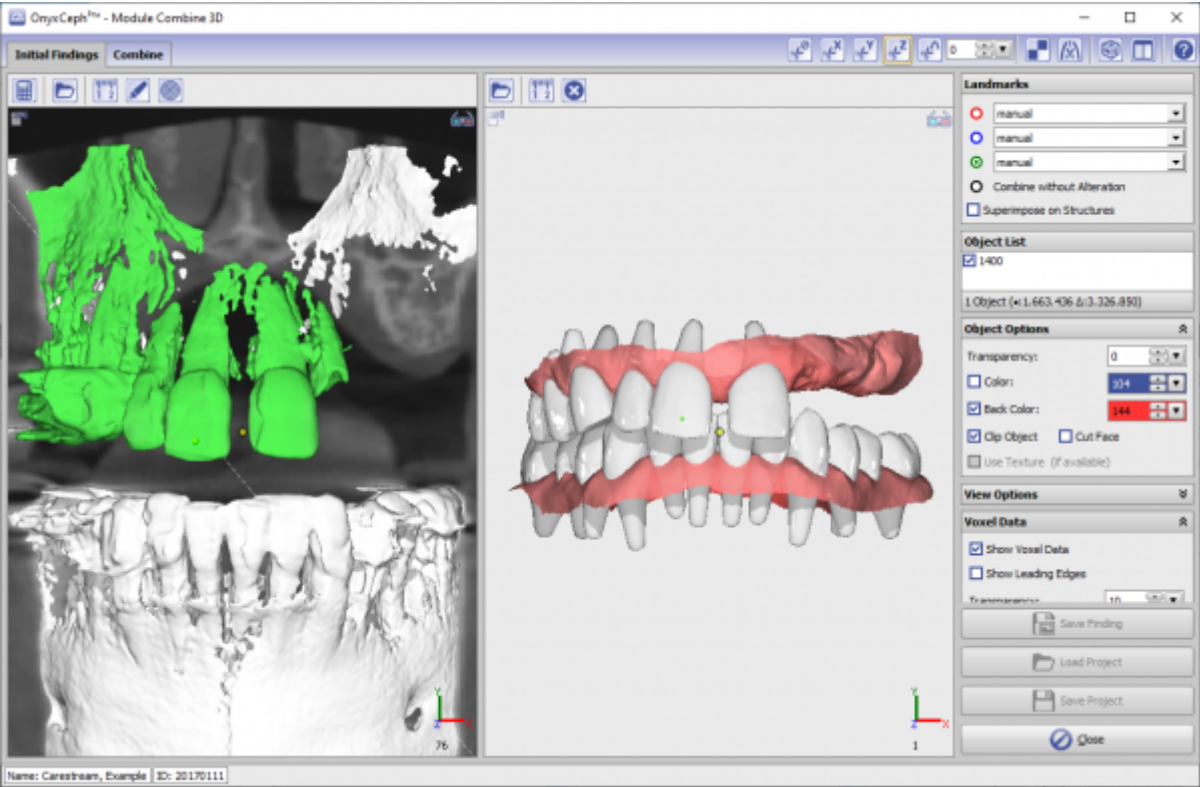

Verweise

	Combine 3D
	Modul-Handout Register 3D
	Panel Oberflächenregistrierung 3D

From:
<http://www.onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:
http://www.onyxwiki.net/doku.php?id=combine_3d

Last update: **2024/03/14 14:50**

