


Settings

Systemoptionen

Im modalen Fenster Systemoptionen können vom Nutzer die für die Arbeit mit dem Programm wesentlichen Standard-Einstellungen für die lokale und globale Anwendungsumgebung vorgenommen werden. Die Einstellungen sind thematisch auf separaten Registerkarten zusammengefasst, die über vertikale Reiter geöffnet werden können. Vorgenommene Einstellungsänderungen müssen einzeln bestätigt werden und werden in der Datenbank gespeichert. Lokale Einstellunen werden in Form lokaler INI-Einträge als Konfiguration zum aktiven Login|Client-PC abgelegt.

Das Fenster kann geöffnet werden über

- Linksklick Hauptmenüeintrag Optionen|Systemoptionen
- Rechtsklick Hauptmenüeintrag Systemoptionen
- Tastatur-ShortCut [STRG]+O

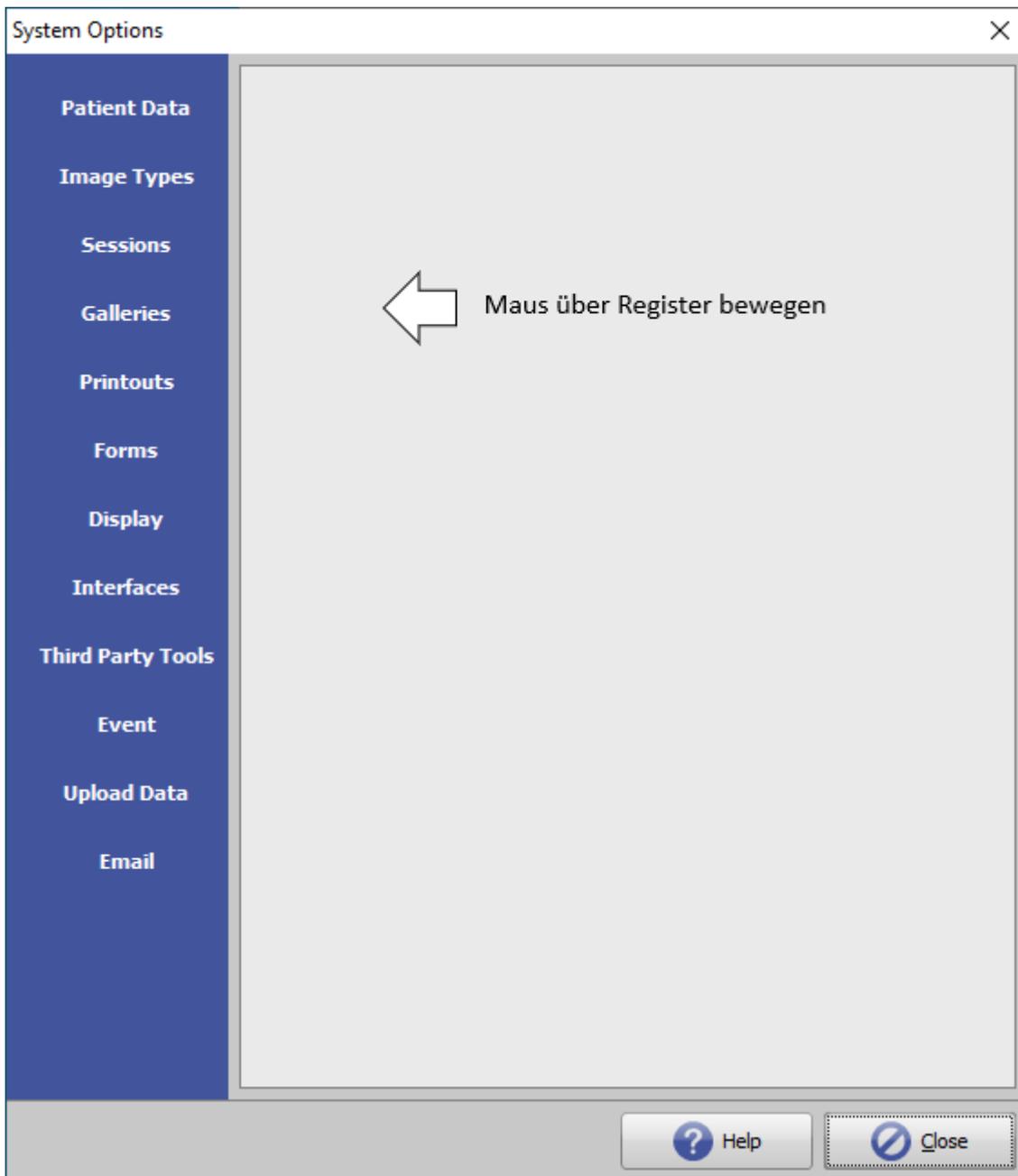

[Click auf Reiter öffnet zugehörigen Wiki-Seite]

	Registerkarte	Einstellungen für ...
1	Reiter Patientendaten	Karteikarten-Thumbnail, VDDS-Media, Marker, Verschiedenes ...
2	Reiter Bildtypen	2D- und 3D-Bildtypen
3	Reiter Sitzungen	2D-Ansichten 1/2/3, 3D-Ansicht
4	Reiter Galerien	Galerien, Präsentationen, Sequenzen, Medien, Ansichtsoptionen ...
5	Reiter Druck	Druckformular-Templates, Briefköpfe, Drucker-Konfiguration ...
6	Reiter Formulare	DHTML-Formulare in Kategorien, Formular-Vollbild-Passwort ...
7	Reiter Auswertung	Ansichtsoptionen, Anwenderanalysen, Anwenderkonturen, Individualisierung Punktreihenfolge ...
8	Reiter Schnittstellen	Konfigurieren Externe Bildquellen, Emailversand, Dokumentenarchiv ...
9	Reiter Externe Programme	Drittprogramme
10	Reiter Ereignis	Ereignisverknüpfungen definieren
11	Reiter Daten hochladen	Container, Reports, Webviews auf FTP-/WEB-Server hochladen
12	Reiter E-Mail	Email-Client und Attachmentversand konfigurieren

INI-Einträge

Lokale Einstellungen für Onyx-Clientanwendungen werden in einer nach Anmeldenamen (Windows-Login) und lokalem Computernamen unterschiedenen Konfiguration (Syntax: Login[Workstation]) in der Datenbank hinterlegt. In Anlehnung an frühere Windows™-Versionen wird eine solche Konfiguration auch als "INI" bezeichnet.

Mit Taste [STRG] und gleichzeitigem Rechtsklick auf die Onyx-Starttaste kann über den Kontextmenü-Eintrag [Konfigurationen] das Fenster [Onyx Konfigurationen](#) geöffnet werden. Dort lassen sich alle im System hinterlegten Konfigurationen anzeigen, bearbeiten, zuweisen und verwalten.

Die aktuell verwendete Konfiguration kann im Editierfenster [INI editieren](#) auch über die Tastenkombination [SHIFT]+[STRG] und gleichzeitigem Linksklick auf das Hilfe-Icon oben rechts im Hauptfenster angezeigt und bearbeitet werden.

INI-Sektion
Sektion [Application]
Sektion [Aligner]
Sektion [CASmart]
Sektion [DigRoentgen]
Sektion [Docmanager]
Sektion [Export 3D]
Sektion [FABonding]
Sektion [ImageAcquire]
Sektion [ImageTypeProps]
Sektion [ImageTypes]
Sektion [InfoServer]
Sektion [Kommunikation]
Sektion [Media]
Sektion [MountCast]
Sektion [PatientSelect]
Sektion [Print]
Sektion [PrintEditor]
Sektion [Settings]
Sektion [Surgery]
Sektion [ThumbOC]
Sektion [VirtualSetup]
Sektion [Waefer]



Hinweis

INI-Einträge sollten nur bearbeitet/angepasst werden, wenn der Anwender über hinreichende Kenntnisse über die Auswirkungen dieser Anpassung verfügt. Unsachgemäße Änderungen, Hinzufügen oder Löschen von INI-Einträgen kann zu unerwünschten Folgen bis hin zur Unbrauchbarkeit der lokalen Anwendung führen.

Skin Farben

Nach der Installation wird die Programmoberfläche in einer grauen Standardfarbe angezeigt. Mit Aktivierung schaltet die Farbe um auf die blaue Standard-Benutzeroberfläche. Wird eine Programmversion mit individuellem

Branding aktiviert (z.B. Programmversionen OnyxCeph³™ CA-Smart 3D), dann erscheint die Programmoberfläche ggfls. in einer anderen Farbe (z.B. rot).

Splash

Ein anwender-individuelles Splashfenster kann beim OnyxCeph³™-Programmstart am Arbeitsplatzrechner für eine vordefinierte Dauer angezeigt werden. Das Splashfenster kann mit Hilfe des Programms [OnyxSplash.exe](#) erstellt und im lokalen Programmverzeichnis Onyx3Client unter dem Name Splash.bin gespeichert werden. Um durch Client-Updates nicht überschrieben zu werden, sollte die Datei Splash.bin auch in das Verzeichnis ..\Onyx3Server\ClientFiles\ auf dem Onyx Datenbankserver kopiert werden.

From:
<https://onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:
<https://onyxwiki.net/doku.php?id=en:settings&rev=1611153074>

Last update: **2021/01/20 15:31**

