


# Interface Configuration Digital Xray: VixWin

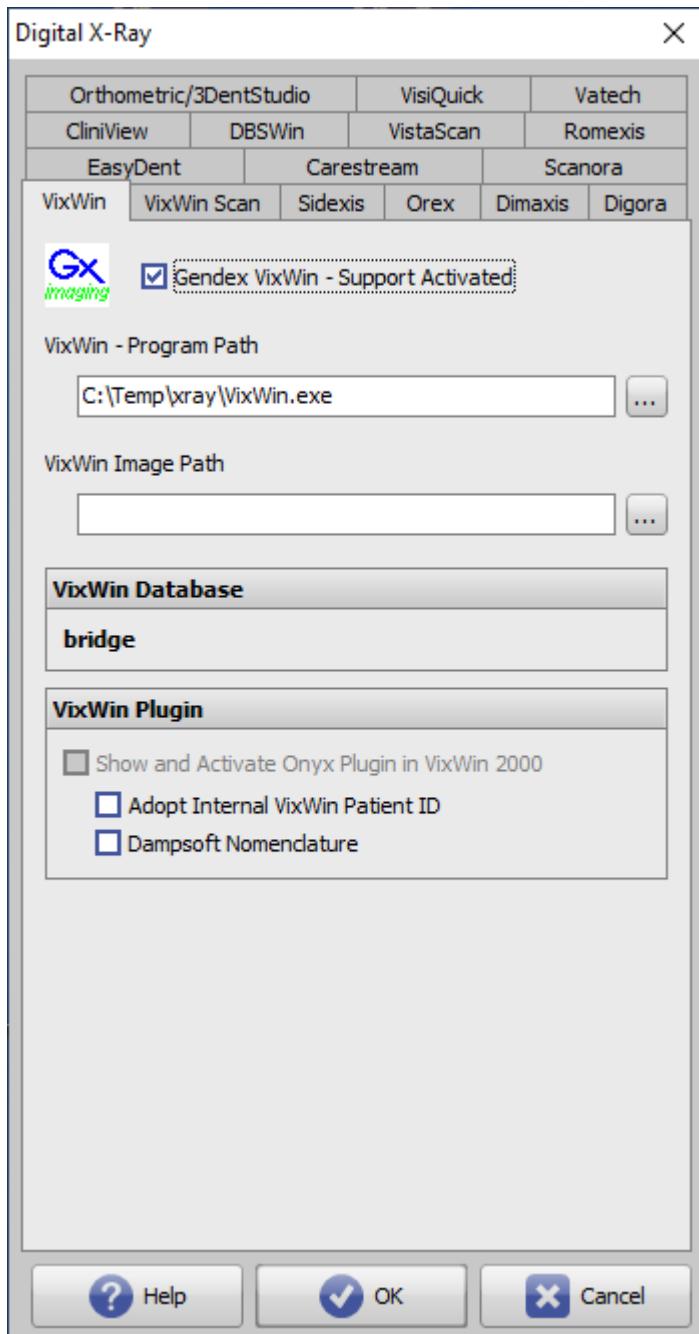

Parameter	Setting
[Support Activated]	Activates import icon button in module Add Image 2D
Programmpfad [...]	Lokaler Pfad zur ausführbaren Datei ..\VixWin.exe
Bildpfad [...]	Lokaler Pfad ..\VXIMAGES
[Plugin VixWin 2000 ]	Plugin Bildübergabe aktivieren (wenn verfügbar)
[VixWin Patientennummer übernehmen]	Nummer des Patienten wird bei Übergabe übernommen
[Dampsoft Nomenklatur]	spezifische Dampsoft Nomenklatur wird übergeben

From:

[http://www.onyxwiki.net/ - \[OnyxCeph<sup>3™</sup> Wiki\]](http://www.onyxwiki.net/)

Permanent link:

<http://www.onyxwiki.net/doku.php?id=en:vixwin>

Last update: **2022/06/27 07:37**

