


Module FA_Bonding: Revision 3.2.169

Ab Update >3.2.157 wird Modul **FA_Bonding** in einer überarbeiteten Version ausgeliefert. Dies betrifft u.a. folgende Features:

1. Navigatoren abgeglichen
2. Punktliste visuell überarbeitet
3. Neue Menüeinträge und Shortcuts
4. Line_Up angepasst

Bedienoberfläche


Mit der Überarbeitung der Funktionalität ist eine geringfügige Anpassung der Bedienoberfläche verbunden:

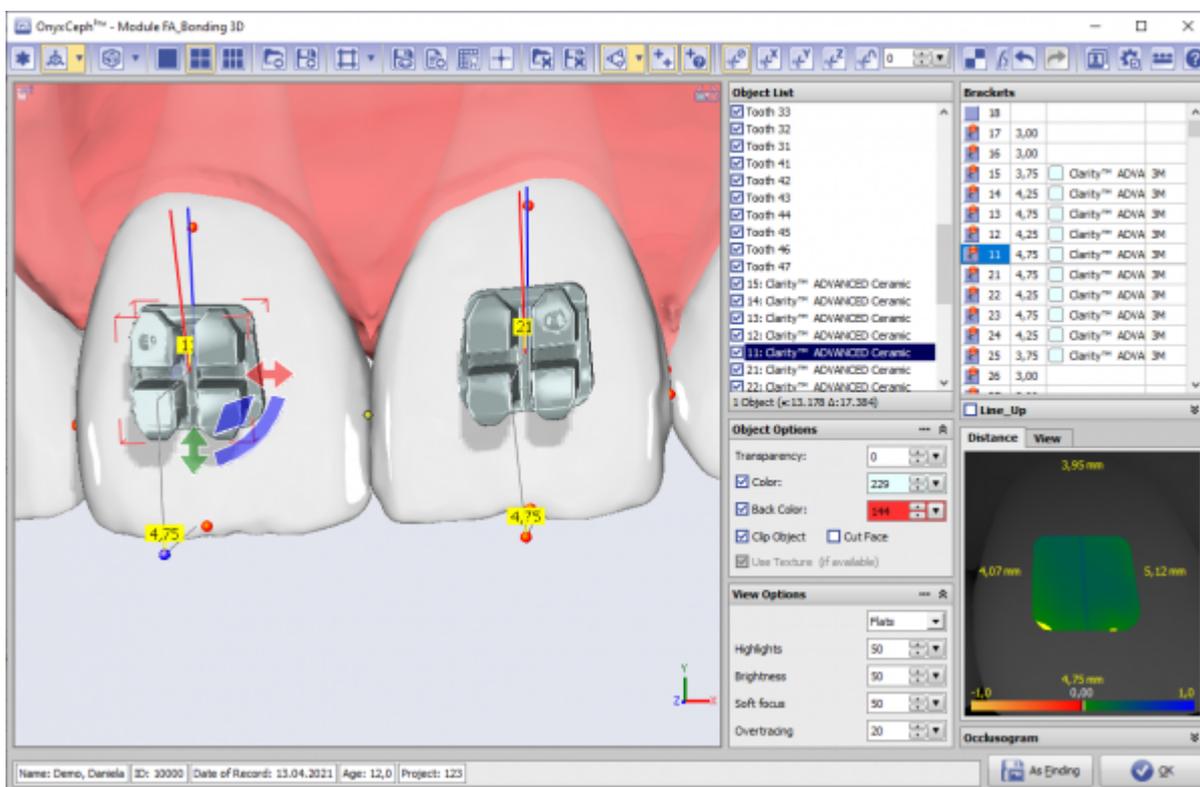

1. Navigatoren

Um die Funktion der Navigatoren bestmöglich der Arbeitsweise bei der physischen Korrektur der Bracketplatzierung (z.B. mit Hilfe eines Setzwerkzeuges; Bantleon-Lineals) anzupassen, wurden Bewegungsrichtungen und Rotationszentrum modifiziert:


- In Richtung Krone entlang Basisnormale
- Mesial-distal entlang Slot
- Positionierhilfe "Bantleon-Lineal" eingeführt
- Mehrfachbewegung werden auch beim 2D Navigator unterstützt

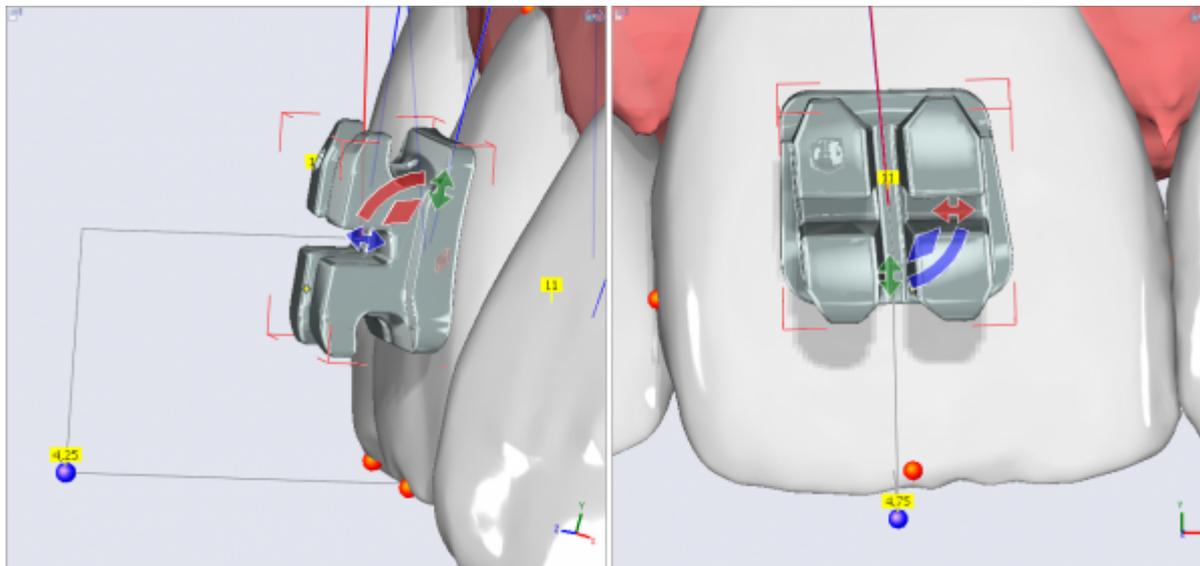

Außerdem wurde das bislang unterschiedliche Verhalten der Navigatoren im 3D-View und im 2D-Navigatorpanel harmonisiert.


2. Punkteliste überarbeitet

Die Listeneinträge verfügen jetzt zusätzlich zu Name und Hersteller über einen der Einfärbung des Brackes entsprechenden Farbmarker, was das Navigieren in der Bracketliste erleichtern soll.

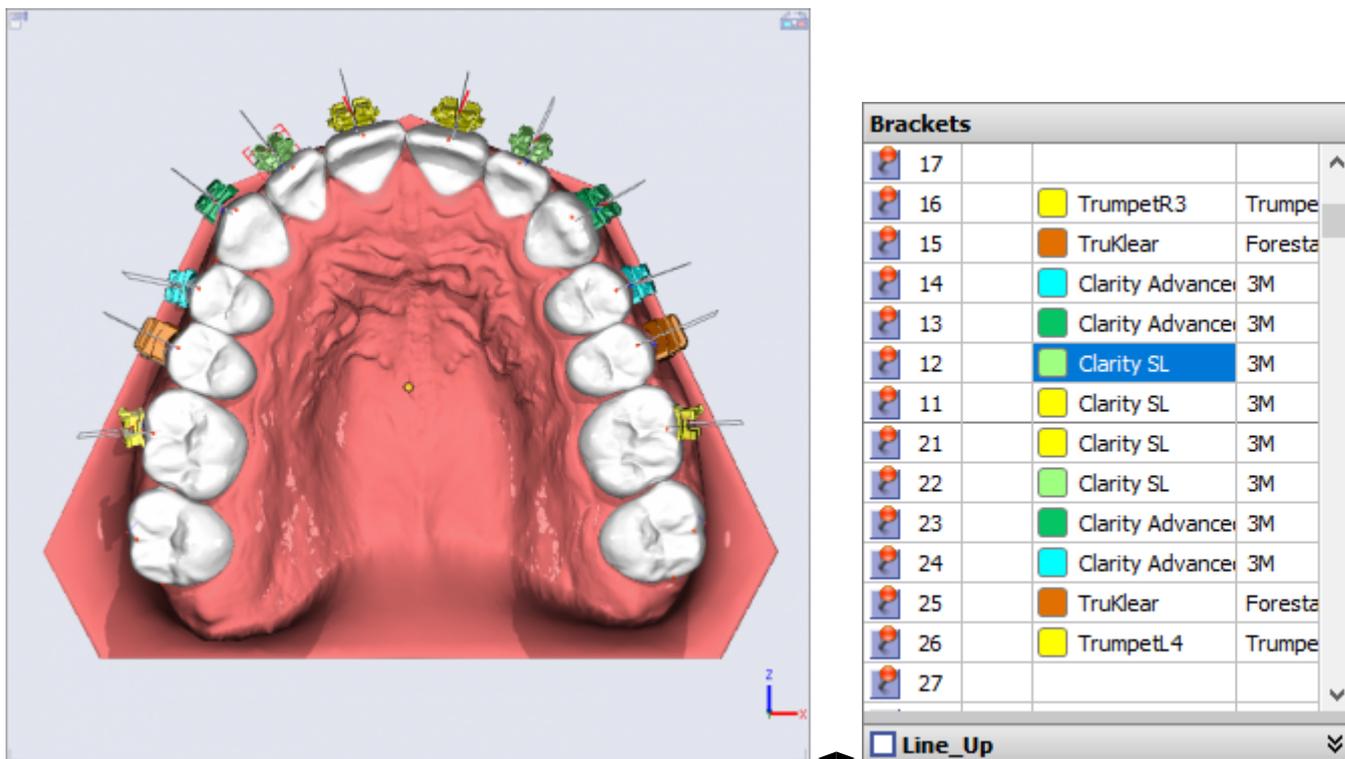

3. Neue Menüeinträge und Shortcuts

Im Kontextmenü wurden einige Einträge und ShortCuts ergänzt. So kann das Ausrichten eines einzelnen oder aller Brackets auf der Zahnkrone jetzt zusätzlich in Richtung dre Basisnormalen erfolgen, ohne eine gleichzeitige Kippung zu verursachen.

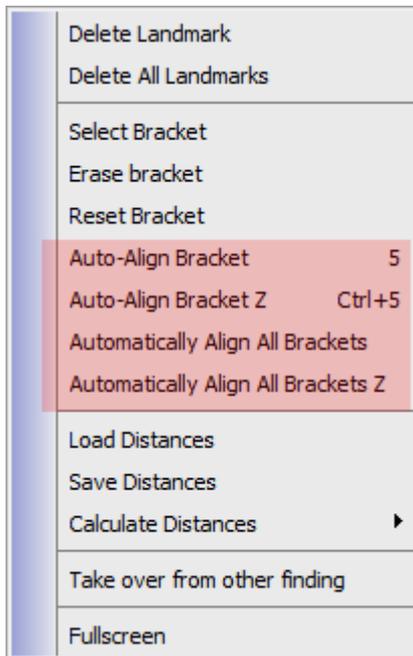

4. Line_Up angepasst

Die Funktion Line_Up wird nun auch für Wechselgebiss unterstützt, wobei für einseitig fehlende Zähne Platzhalter entsprechend der gegenüberliegenden Krone verwendet werden.

From:
<http://onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:
http://onyxwiki.net/doku.php?id=fclft_fab

Last update: 2021/11/30 08:59

