
2023/12/09 02:59 1/1 | Icon-Tasten [Bilddarstellung]

Icon-Tasten [Bilddarstellung]

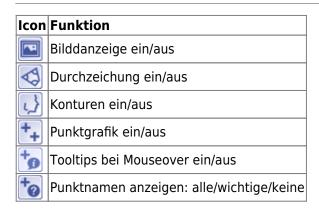

Mit Icon-Tasten [Bilddarstellung] kann die Darstellung innerhalb des 2D- und 3D-Bildfensters beeinflusst werden, indem einzelne grafische Elemente aktiviert bzw. deaktiviert werden.

In den Modulen Auswertung 2D und Auswertung 3D führt das Deaktivieren der Konturanzeige optional dazu, dass in der Referenzpunktliste alle Punkte ausgeblendet werden, die ausschließlich zum Zeichnen der aktiv geschaltenen Konturen benötigt werden. Diese Option kann mittels Icon-Taste Ansichtsoptionen in Fenster Ansichtsoptionen auf Reiter Oberfläche gewählt werden. Die davon betroffenen Konturen werden im selben Fenster auf Reiter Konturen ausgewählt.

From:

http://onyxwiki.net/ - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:

http://onyxwiki.net/doku.php?id=ic_016

Last update: 2019/01/21 11:49

