

# Icon-Taste [Kronen einfärben]

Icon	Funktion
	keine Kroneneinfärbung
	Einfärbung Zwischenkronenabstand / Okklusaler Abstand

Mit Icon-Tasten [Kronen einfärben] kann zwischen den Zuständen


- keine Einfärbung,
- Zwischenkronen einfärben und
- okklusale Abstände einfärben

für die Darstellung im [3D-Bildfenster](#) umgeschalten werden.


## Keine Einfärbung




Beim Start eines Moduls, in dem die Icon-Taste [Kronen einfärben] verfügbar ist, ist die Einfärbung standardmäßig deaktiviert.

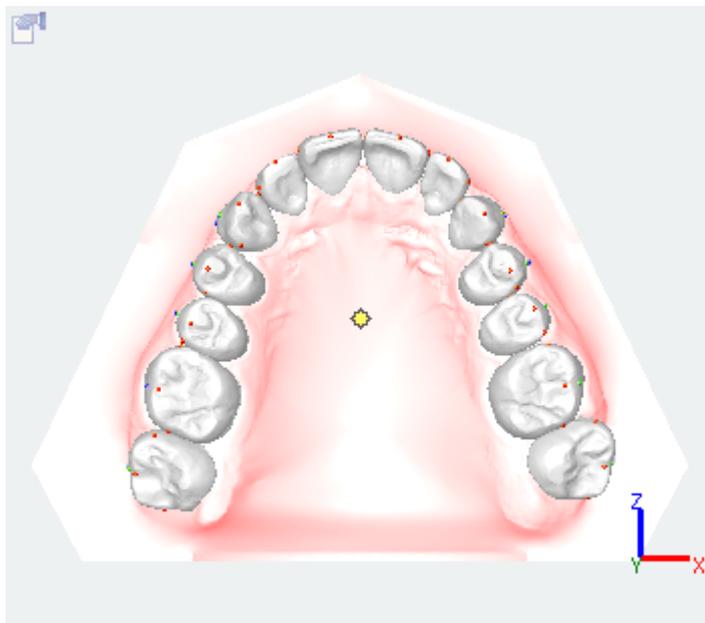

## Einfärbung nach Zwischenkronenabständen

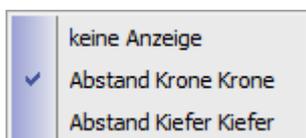

Bei Auswahl des Kontextmenüeintrages [Abstand Krone-Krone] werden die Zwischenkronenabstände blau, grün oder rot eingefärbt. Gemessen wird in einer Ebene senkrecht zur Verbindungslinie der mesial-distalen Kronenmittelpunkte.

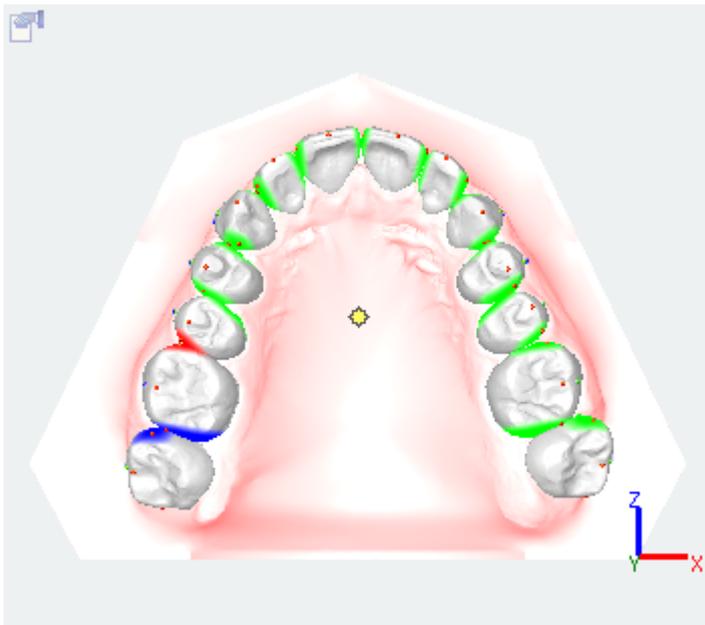


Die Farben haben folgende Bedeutung:

Farbe	Kronenabstand	Interpretation
blau	< 0,05 mm	Lücke
grün	0,05mm ... 0,00mm	Kontakt
rot	> 0,00 mm	Durchdringung

### Einfärbung nach okklusalen Abständen



Bei Auswahl des Kontextmenüeintrages [Abstand Kiefer-Kiefer] werden die okklusalen Abstände farbcodiert.

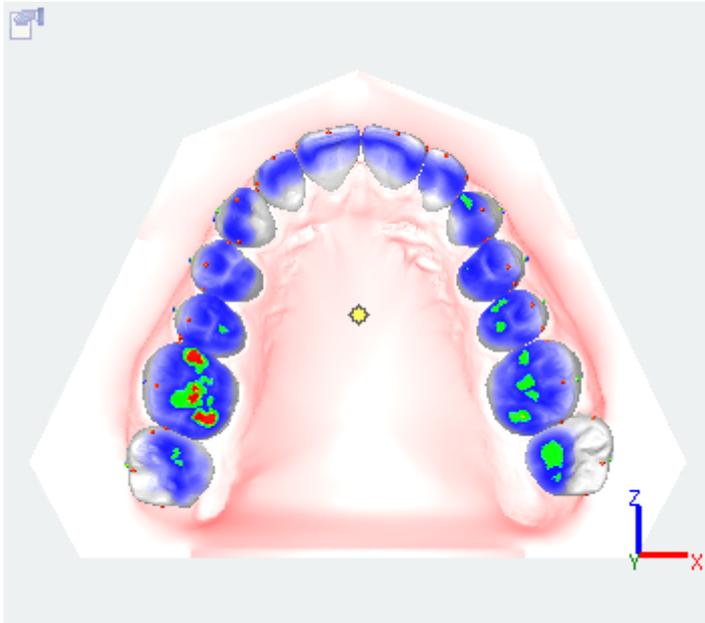

Die Farbcodierung entspricht der im [Panel Okklusogramm](#). Die Farbbereiche haben einheitlich folgende Bedeutung:

Farbe	Kieferabstand	Interpretation
orange ... rot	< 0 mm Durchdringung	
gelb	= 0 mm	Kontakt
grün ... blau	> 0 mm	kein Kontakt

From:

<https://onyxwiki.net/> - [OnyxCeph<sup>3</sup>™ Wiki]

Permanent link:

[https://onyxwiki.net/doku.php?id=ic\\_019](https://onyxwiki.net/doku.php?id=ic_019)

Last update: 2015/10/25 18:17

