
2023/12/01 13:27 1/2 [Clip]-Tasten

## [Clip]-Tasten

In jedem 3D-View kann die Ansicht der dargestellten 3D-Szene mit Hilfe einer Clip-Ebene in definiertem Mittenabstand geschnitten werden.


Auswahl	Mausfunktion (Linke Taste gedrückt)
LO	Aktuelle Clipebene aus
&X	Clip-Ebene X aktivieren
*Y	Clip-Ebene Y aktivieren
~Z	Clip-Ebene Z aktivieren
%n	Radiale Clip-Ebene aktivieren
0	Mittenabstand Clip-Ebene einstellen
	Cliprichtung (vorn/hinten) umschalten
( <u>k</u> )	Clip-Ebene auf Abbildungsebene ausrichten

Für die in der Objektliste fokussierten Einzelobjekte kann das Clippen deaktiviert werden, indem die Checkbox [Objekt beschneiden] in Panel Objektoptionen deaktiviert wird. Die Clipebene kann offen oder geschlossen dargestellt werden. Für eine geschlossene Darstellung muss Checkbox [Schnittfläche] in Panel Objektoptionen aktiviert sein.

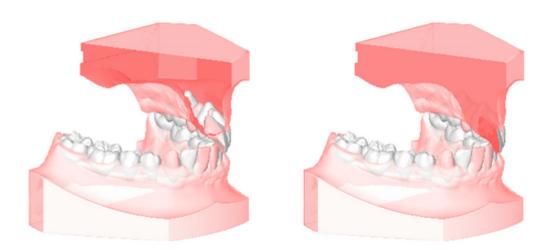

Um in der Clip-Ebene Punkte setzen und messen zu können, kann bei gedrückter Taste [Umschalt] in der Clip-Ebene eine Hilfsebene als 3D-Objekt eingeblendet werden, auf der Messpunkte platziert werden können. Ist das erste Teilobjekt im Datensatz mit Volumendaten hinterlegt, kann anstelle der Hilfsebene der jeweilige Volumenschnitt visualisiert werden, wenn in Panel Voxeldaten die Checkbox [Voxeldaten anzeigen] aktiviert ist. Im selben Panel kann die Transparenz des Volumenschnitts eingestellt werden.

ic\_021

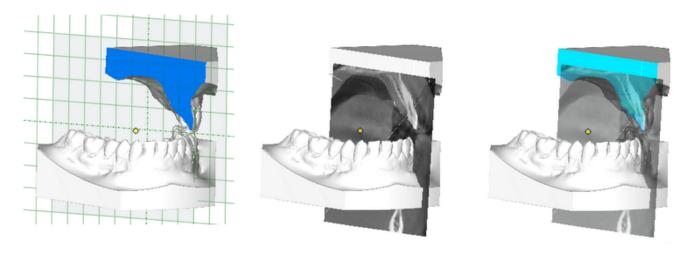

From:

https://www.onyxwiki.net/ - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:

https://www.onyxwiki.net/doku.php?id=ic\_021

Last update: 2020/03/25 13:07



https://www.onyxwiki.net/ Printed on 2023/12/01 13:27