

Bildtypliste 2D

Bildtypliste 2D [Bildtypliste 3D](#)

In OnyxCeph³™ können vordefinierte 2D-Bildtypen zur Klassifikation importierter Bilder verwendet werden. Über die Zuordnung eines Bildtyps werden den importierten Bilder bestimmte Eigenschaften zugewiesen, die für ihre spätere Verwendung im Programm hilfreich sind. Die verfügbaren 2D-Bildtypen werden in den Kategorien


- Bild
- Röntgen
- Intraoral
- Modell

zusammengefasst und können über Menüpunkt [Optionen|Systemoptionen auf Tab 2D Bildtypen](#) aktiviert, deaktiviert und individualisiert werden.

Der **Code** des Bildtyps kann im Kommandozeilen-Interface (CLI) für die Angabe des Typs übergebener Bilder benutzt werden.

Außerdem kommen die Codes in OnyxQuery zur Anwendung.

Kategorie Bild

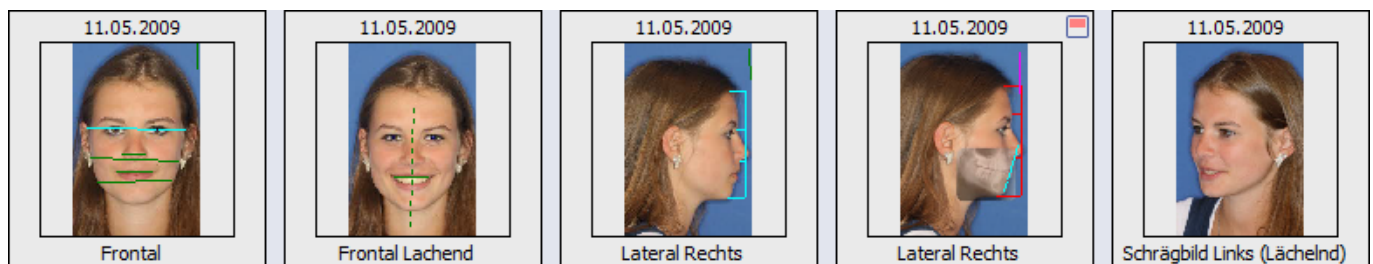


Icon	Name	Bildtyp für Code	Code
	Frontal	PhotoFrontal	PF
	Frontal (Geöffnet)	PhotoFrontalOpen	PFO
	Frontal lachend	PhotoFrontalSmile	PFS
	Lateral Rechts	PhotoLateralRight	PLR
	Lateral Rechts (Geöffnet)	PhotoLateralRightOpen	PLRO

Icon	Name	Bildtyp für Code	Code
	Lateral Rechts (Lächelnd)	PhotoLateralRightSmile	PLRS
	Lateral Links	PhotoLateralLeft	PLL
	Lateral Links (Geöffnet)	PhotoLateralLeftOpen	PLLO
	Lateral Links (Lächelnd)	PhotoLateralLeftSmile	PLLS
	Schrägbild Rechts	PhotoObliqueRight	POR
	Schrägbild Rechts (Geöffnet)	PhotoObliqueRightOpen	PORO
	Schrägbild Rechts (Lächelnd)	PhotoObliqueRightSmile	PORS
	Schrägbild Links	PhotoObliqueLeft	POL
	Schrägbild Links (Geöffnet)	PhotoObliqueLeftOpen	POLO
	Schrägbild Links (Lächelnd)	PhotoObliqueRightSmile	PORS
	Ohne Typ	NoType 2D	NO2D
	Unteransicht	PhotoFrontalSMV	PFSMV
	Nase Mund	PhotoFrontalNoseMouth	PFNM
	Nase	PhotoFrontalNose	PFN

Icon	Name	Bildtyp für Code	Code
	Frontal (Mund entspannt)	PhotoFrontalMouthRelaxed	PFMR
	Frontal (Mund Weit Geöffnet)	PhotoFrontalMouthWideOpen	PFMWO
	Krone	PhotoCrown	PC
	Anwender 1	User1	US1
	Anwender 2	User2	US2
	Anwender 3	User3	US3
	Anwender 4	User4	US4
	Anwender 5	User5	US5
	Anwender 6	User6	US6
	Anwender 7	User7	US7

Kategorie Röntgen

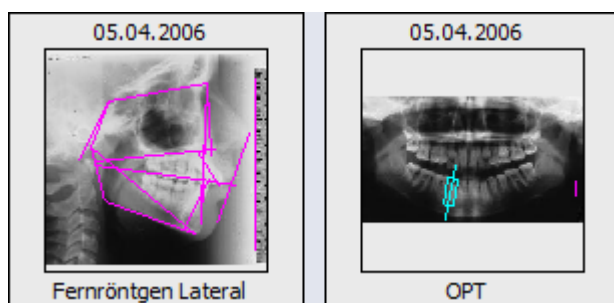

Icon	Name	Bildtyp für Code	Code
	Fernröntgen Lateral (links)	XRayCephalogramLeft	XRCL
	Fernröntgen Lateral	XRayCephalogramRight	XRCR
	OPT	XRayPanoramic	XPAN
	TMJ Links	XRayTMJLeft	XRTMJL
	TMJ Right	XRayTMJRight	XRTMJR
	TMJ	XRayTMJ	XRTMJ
	Fernröntgen P-A	XRayCephalogramPostAnt	XRCPA
	Fernröntgen A-P	XRayCephalogramAntPost	XRCAP
	Handröntgen (links)	XRayHandLeft	XRHL
	Handröntgen (rechts)	XRayHandRight	XRHR
	SMV	XRaySMV	XRSMV
	Zähne	XRayTeeth	XRTT
	Zahn 1	XRayTooth1	XRT1
	Zahn 2	XRayTooth2	XRT2

Icon	Name	Bildtyp für Code	Code
	Zahn 3	XRayTooth3	XRT3
	Zahn 4	XRayTooth4	XRT4
	Zahn 5	XRayTooth5	XRT5
	Zahn 6	XRayTooth6	XRT6
	Zahn 7	XRayTooth7	XRT7


Kategorie Intraoral



Icon	Name	Bildtyp für Code	Code
	Okklusion Anterior	IntraOralOcclusionAnterior	IOOA
	Okklusion Anterior (Entspannt)	IntraOralOcclusionAnteriorRelaxed	IOOAR
	Okklusion Anterior (Weit Geöffnet)	IntraOralOcclusionAnteriorWideOpen	IOOAWO
	Okklusion rechts	IntraOralOcclusionRight	IOOR
	Okklusion Links	IntraOralOcclusionLeft	IOOL

Icon	Name	Bildtyp für Code	Code
	Okklusion OK	IntraOralMaxillaOcclusal	IOMAXO
	Okklusion UK	IntraOralMandibulaOcclusal	IOMANDO
	Overjet Rechts	IntraOralOverJetRight	IOOJR
	Overjet Links	IntraOralOverJetLeft	IOOL

Kategorie Modell

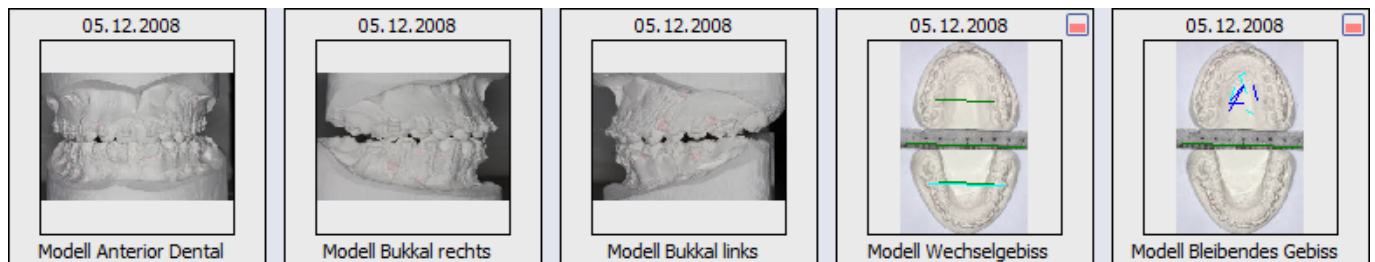

Icon	Name	Bildtyp für Code	Code
	Modell Okklusion OK	CAstMaxillaOcclusal	CAMAXO
	Modell Okklusion UK	CAstMandibulaOcclusal	CAMANDO
	Modell Anterior Dental	CAstAntDental	CAAD
	Modell Bukkal rechts	CAstBuccalRight	CABR
	Modell Bukkal links	CAstBuccalLeft	CABL
	Modell Milchgebiss	CAstDeciduous	CAD

Icon	Name	Bildtyp für Code	Code
	Modell Wechselgebiss	CAstMixed	CAM
	Modell Bleibendes Gebiss	CAstPermanent	CAP

From:

<https://onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:

https://onyxwiki.net/doku.php?id=imagetypes_2d

Last update: **2023/02/16 22:30**

