

Eintrag EnTransferData

Syntax

```
[Application]
EnTransferData=value    // Befundtrasfer aktivieren
value = 0 //deaktiviert
value = 1 //aktiviert
```

Beschreibung

Der Eintrag [Befund-Transfer] im Thumbnail-Kontextmenüeintrag [Senden an ...] wird aktiviert. Wird dieser Eintrag mit [STRG]+[SHIFT] gewählt, wird der betreffende Bildbefund im Hauptspeicher gepuffert. Ein solcher Befund kann bei einem beliebigen Client/Patienten über Hauptmenü [Patient|Patient wählen|BefundTransfer] oder alternativ über Shortcut [STRG]+T eingefügt werden.

Soll der Originalbefund nicht dupliziert, sondern verschoben werden, muss er nach dem Einfügen beim Zielpatienten im Anschluss manuell gelöscht werden.

From:

<https://www.onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:

https://www.onyxwiki.net/doku.php?id=ini_application_entransferdata

Last update: **2016/02/10 18:10**

