


Hauptfenster-Reiter |Präsentation|

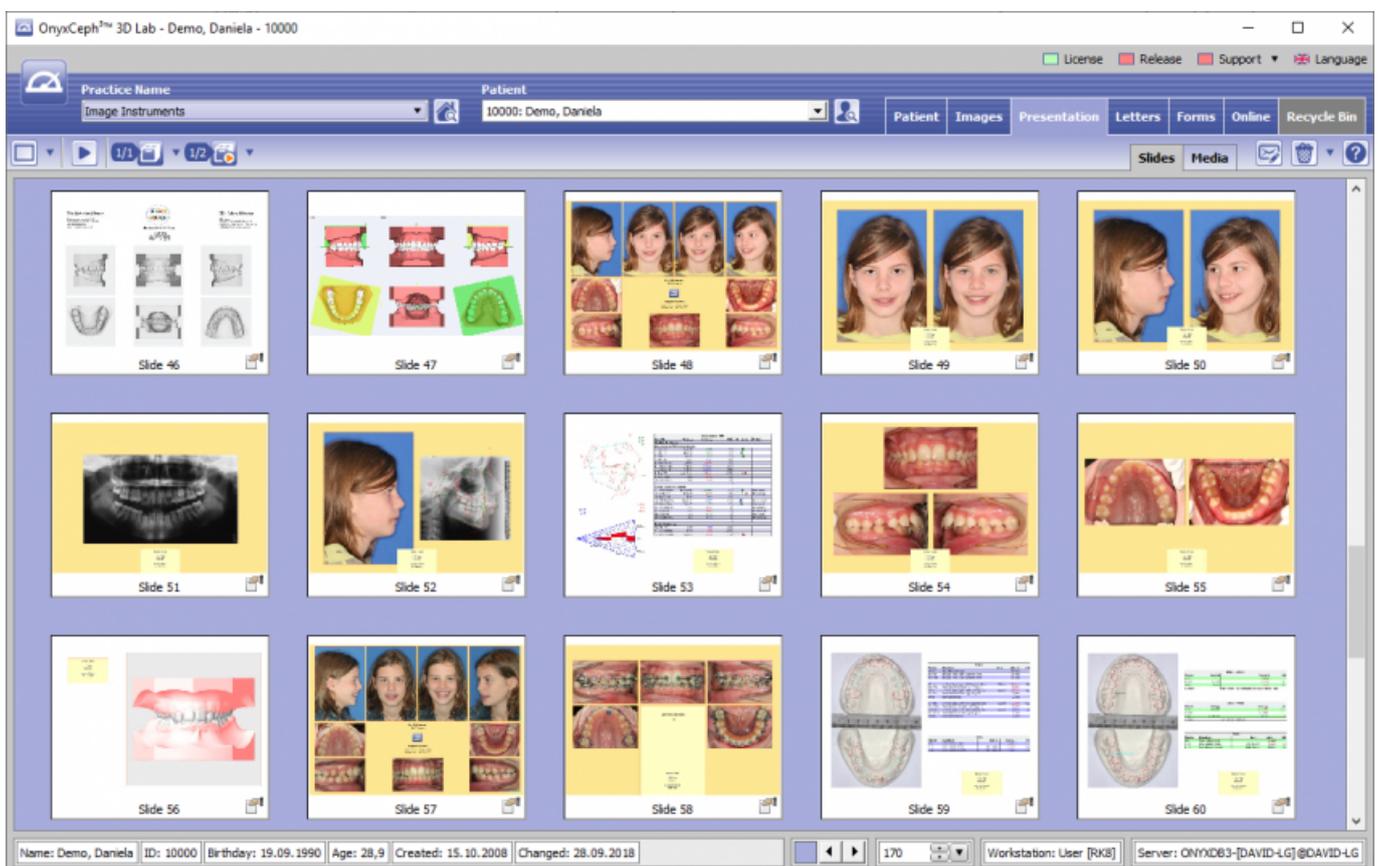

Register |Präsentation| dient Aufgaben der Patientenberatung mit Möglichkeiten einer patientenbezogenen Präsentation numerischer, verbaler und grafischer Behandlungsdaten sowie patientenunabhängiger Fallbeispiele in den Sub-Registern |Dias| und |Medien|.

Benutzeroberfläche: Dias




Auf Sub-Register |Dias| können Sie eine PowerPoint-ähnliche Präsentation (Slideshow) zum Patienten erstellen und für Beratungs- und Dokumentationszwecke benutzen. Die Einzelpräsentationen können auf verschiedene Weise generiert werden:

- Präsentation neu anlegen
- Präsentation aus Layoutvorlage erstellen
- Präsentations-Sequenz erstellen
- Präsentation aus Einzelbild erstellen

Die erstellten Einzel-Präsentationen werden als Miniaturbild (Dia) einstellbarer Größe im Arbeitsbereich stetes am Ende bereits vorhandener Dias angezeigt. Über Icon-Tasten und Kontextmenü kann die Präsentation verwaltet und gestartet werden.

Das im Fussbereich der Miniaturbilder gezeigte Drag&Drop-Symbol erlaubt eine Übergabe der Einzelpräsentation per Drag&Drop als Bitmap an PowerPoint oder andere MS Office-Anwendungen.

Benutzeroberfläche: Medien

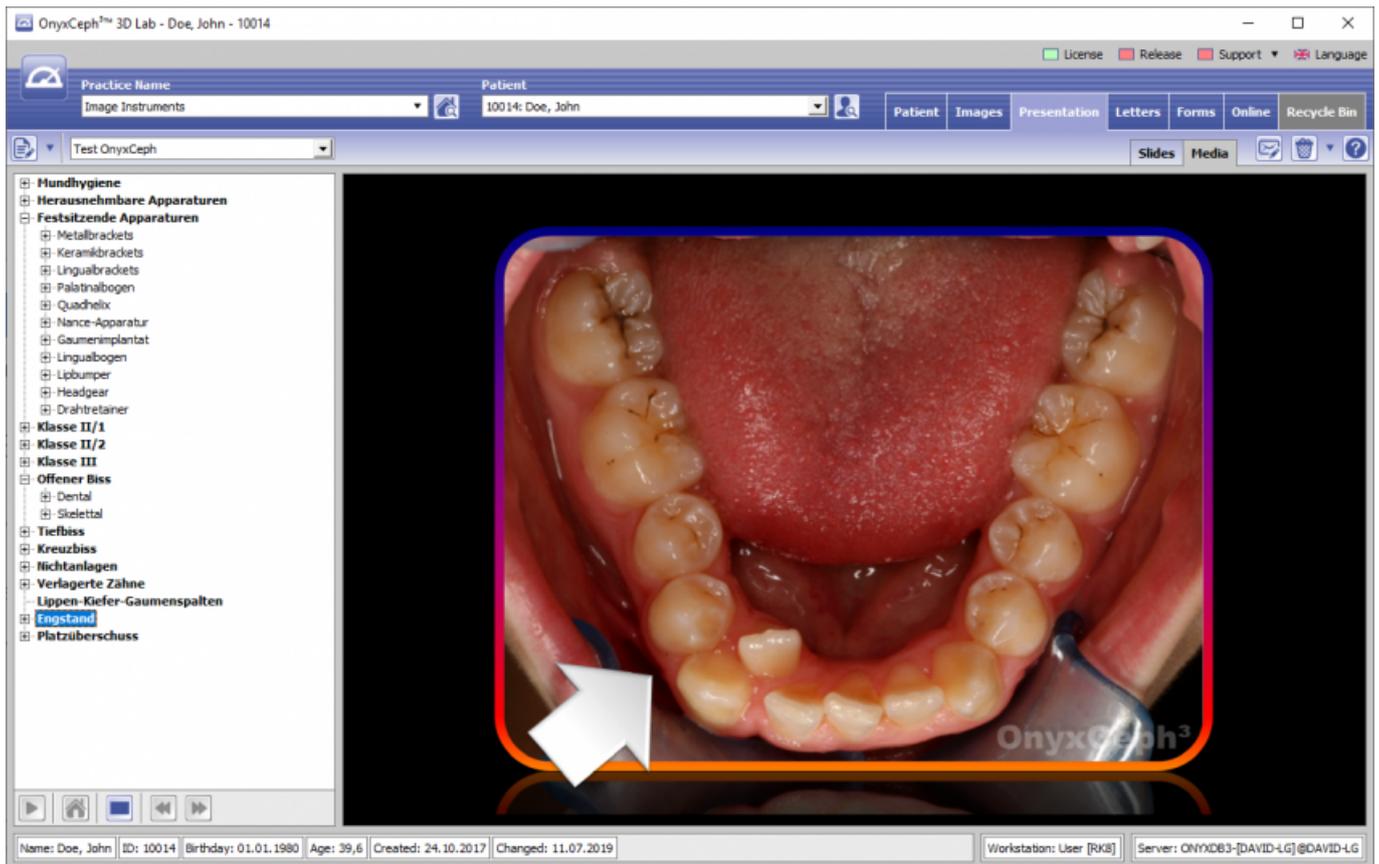

Auf Sub-Register [Medien] kann ein strukturierter Präsentationsbaum mit patientenunabhängigen Bildern und Animationen für Beratungszwecke genutzt werden. Bei Auslieferung ist ein Beispiel-Medienbaum "OnyxCeph" mit Beispielbildern zu verschiedenen Problemstellungen im Rahmen einer kieferorthopädischen Behandlung vorinstalliert. Dieser Beispielbaum ist nicht editierbar. Allerdings können sie sich über Icon-Taste [Neue Baumstruktur] je nach Bedarf selbst beliebig viele neue Medienbäume generieren und diese über Icon-Taste [Baum bearbeiten] mit eigenen Bildern oder Animationen füllen und mit Taste [Baumstruktur speichern] in der Datenbank ablegen.

Die hinterlegten Bilder und Animationen können durch Auswahl des betreffenden Zweiges des Medienbaums im Vorschaupanel rechts geöffnet werden. Durch Doppelklick in die Vorschau oder Verwendung der Taste [Vollbild] unterhalb des Baumstruktur-Panels kann das Bild oder die Animation im Vollbild angezeigt werden.

From:
<http://onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:
http://onyxwiki.net/doku.php?id=maintab_presentation

Last update: **2023/02/15 13:37**

