

Onyx-Datenbankserver 3.2 verschieben


Für den Fall, dass die OnyxCeph™ Datenbank auf eine neue Hardware übertragen werden soll, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

1. Fordern Sie [hier](#) einen Downloadlink für das aktuelle Release OnyxCeph³™ 3.2 an.
2. [Aktualisieren](#) Sie die bestehende Installation auf dem bisherigen Server.
3. Beenden Sie das Datenbankserverprogramm [OnyxDBServer.exe](#) auf dem bisherigen Server über das Programm [Onyx3Config](#).
4. Führen Sie auf dem neuen Server eine [Neuinstallation](#) OnyxCeph³™ durch.
5. Beenden Sie das Datenbankserverprogramm [OnyxDBServer.exe](#) auf dem neuen Server über das Programm [Onyx3Config](#).
6. Kopieren Sie die Unterverzeichnisse vom bisherigen Server an die entsprechende Position auf dem neuen Server. Die beiden zuvor neu installierten Verzeichnisse werden hierbei überschrieben:

```
..\Onyx3Server\OnyxDB  
..\Onyx3Server\Pictures
```


Der Installationspfad ..\ wird im Panel [Status Information] angezeigt.

7. Starten Sie das Datenbankserverprogramm [OnyxDBServer.exe](#) auf dem neuen Server über das Programm [Onyx3Config](#) als Programm (rechtes Taste).
Hinweis: Das Programmfenster OnyxDBServer minimiert sich nach Start in das Systemtray in der Taskleiste und muss von dort wieder maximiert werden, um mit Schritt 8 fortzufahren.
8. Indizieren Sie die Bilddatenbank im Hauptfenster des Server-Programms [OnyxDBServer.exe](#) auf Register [Einstellungen|Unterregister |Verzeichnisse| mit Taste [Bilddatenbank neu indizieren]. Stoppen Sie danach den Onyx-Datenbankserver über das Programm [Onyx3Config](#) und starten ihn anschließend als Dienst (linke Taste).

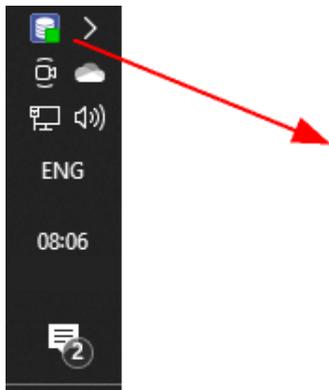

To see the OnyxServer icon in the system tray, OnyxDBServer needs to run as a program not as a service.

Use Onyx3Config to switch from service to program mode if missing the icon.

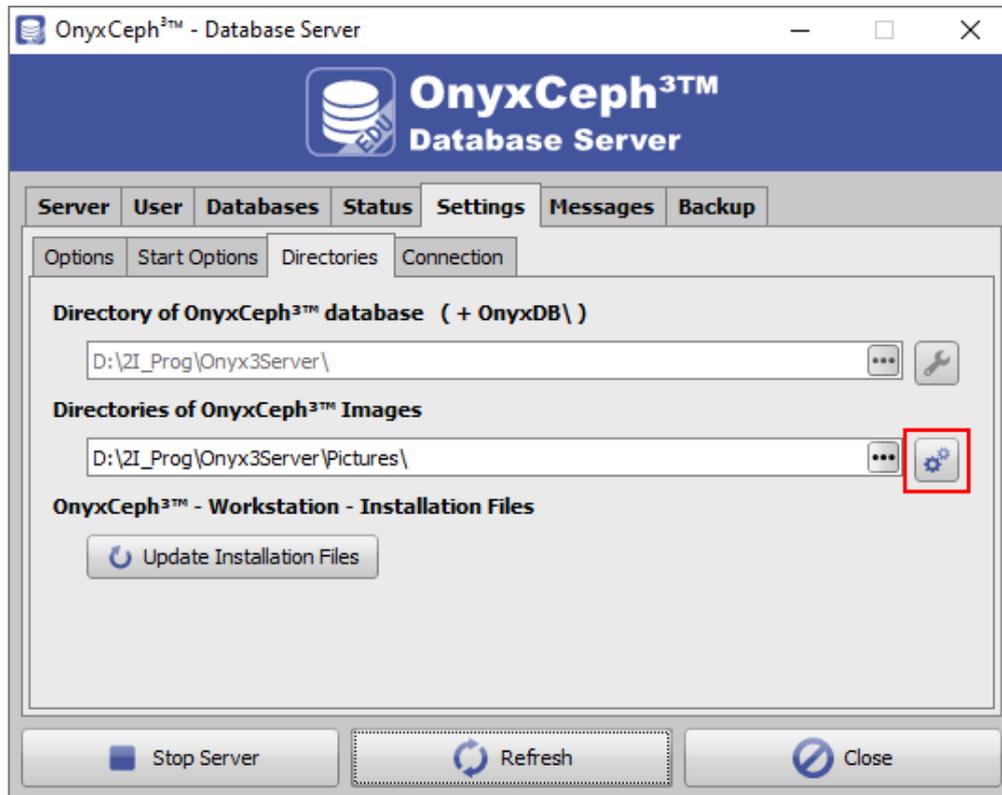

9. Öffnen Sie das Programm [OnyxCeph 3|OnyxRegister](#) an einem beliebigen Arbeitsplatz aus der Programmgruppe OnyxCeph 3. Generieren Sie in Schritt 2 einen [neuen Installationscode](#) und fordern Sie danach mit Taste [Email] einen neuen Aktivierungscode bei Image Instruments an.

10. Verbinden Sie die OnyxCeph^{3™}-Arbeitsplätze (Clients) nach Neustart (mit Administratorrechten) mit dem neuen Server via TCP|IP-Verbindung und legen Sie diese Verbindung als Standard fest (erfordert den Start von OnyxCeph als Administrator).

From: <https://www.onyxwiki.net/> - [OnyxCeph^{3™} Wiki]

Permanent link: <https://www.onyxwiki.net/doku.php?id=moveserver>

Last update: **2024/03/21 12:25**

