
## Mehrere Attachments je Krone verwenden

In Modul Aligner 3D kann jeder Krone über das Kontextmenü im Panel [Attachmnets] ein Attachment aus der internen Attachmentbibliothek zugewiesen werden. Sollen für eine Krone mehrere Attachmnets verwendet werden, dann kann über das Kontextmenü im Panel [Attachmnets] ein Eintrag [Neuer Punkt] erzeugt und per Rechsklick auf die betreffende Krone gesetzt werden. Damit ändert sich der Name des Eintrages von [Neuer Punkt] auf die betreffende Zahnnummer (z.B. [Zahn 11]) und ein weiteres Attachment aus der internen Attachmentbibliothek kann derselben Krone zugewiesen werden.

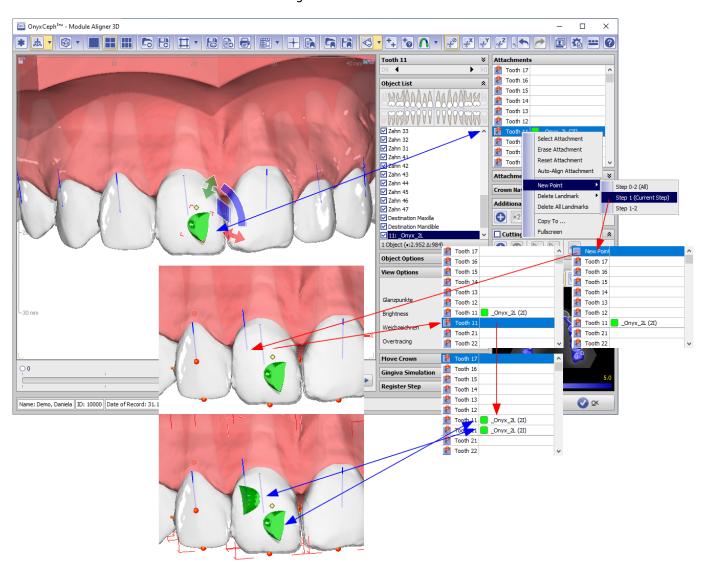

Mit Option AttachmnegtRuleEditor lassen sich ebenfalls mehrere Attachments auf derselben Krone platzieren.



https://www.onyxwiki.net/ Printed on 2023/10/22 18:24