


Panel Bildtyp

Im Panel Bild werden in den Kategorien

- Bild
- Röntgen
- Intraoral
- Modell

die im System aktivierten Bildtypen als Symbole in wählbarer Ansicht gezeigt. Die Symbole können einzelnen oder Gruppen von importierten (und als Thumbnail in den betreffenden Sitzungen angezeigten) Bildern per Drag&Drop zugeordnet werden, um diese mit dem zutreffenden Bildtyp zu klassifizieren. Die Auswahl (Aktivierung) der als Symbol angezeigten Bildtypen erfolgt im Menü Systemoptionen auf [Register Bildtypen](#).

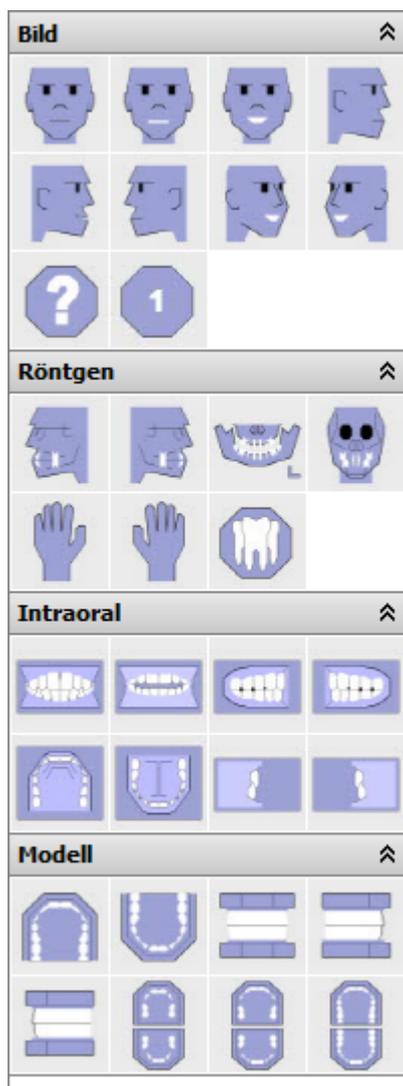

Im Kontextmenü des Panels können verschiedene Ansichtsoptionen eingestellt werden:

- Ansicht (Liste oder Array)
- Miniaturgröße (24x24...(8)...64x64)
- Erweitern (alle Bildtypsymbole der Kategorie anzeigen)
- Reduzieren (alle Bildtypsymbole der Kategorie verbergen)

From:
<http://onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:
http://onyxwiki.net/doku.php?id=panel_imagetype_2d

Last update: **2016/03/24 22:26**

