

Client-Programm OnyxSync



Das Hilfsprogramm OnyxSync wird eingesetzt, um Daten zwischen zwei verbundene Onyx-Datenbanken abzugleichen. Vorrangig wird das Programm verwendet, um ausgewählte oder alle Daten des Netzwerkservers auf die Standalone-Instanz auf dem Notebook zu übertragen, während sich beide Datenbanken im selben Subnetz befinden.

Der Programmstart erfolgt aus der Programmgruppe OnyxCeph3 im Windows-Startmenü am lokalen Arbeitsplatz.

Bedienoberfläche

The screenshot shows the OnyxSync application window. At the top, there are two database selection boxes, both containing 'ASUS2'. A dropdown menu is set to 'Image Instruments'. A button labeled 'Daten von links nach rechts' is visible. Below this is a table with columns: 'Suchen...', and 'Marker'. The table contains patient records with columns: 'Patiente...', 'Nachname', 'Vorname', 'Geschlecht', 'Modellnr. /...', 'Gebur...', 'Zusät...', 'Versic...', 'Attrib...', 'Behan...', 'Bilder', and 'Bef...'. The record for patient 10097 (Dirk) is highlighted.

Patiente...	Nachname	Vorname	Geschlecht	Modellnr. /...	Gebur...	Zusät...	Versic...	Attrib...	Behan...	Bilder	Bef...	Marker
10092		Ingo	Männlich		12.12....					4	3	
10011		Nikos	Männlich		12.12....				AS	4	0	
2201934...		Lisa	Männlich	6381	02.01....			Dolphin	KO	17	2	
10003		Sylvie	Weiblich		16.12....					16	4	
10001		Ines	Weiblich		26.10....					32	7	
10088		Samstag	Männlich		06.05....					0	0	
10097		Dirk	Männlich		12.12....					5	1	
10037		x	Männlich		26.02....					4	2	
10041		li	Weiblich		18.03....					18	7	
10013		y	Weiblich		12.12....					7	1	
FR-160094		Carlin	Weiblich		10.10....					7	6	
10060		mhfjg	Weiblich		21.04....					0	0	
2365874		Patient	Weiblich		12.12....					13	6	

From:
<https://www.onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]
 Permanent link:
https://www.onyxwiki.net/doku.php?id=program_onyxsync
 Last update: 2024/03/06 11:58



