


# Auswahlliste Praxis

Die Software OnyxCeph<sup>3</sup>™ kann parallel mehrere Mandanten verwalten. Neue Mandanten (Praxen, Klienten) werden automatisch durch den Container-Import von Patientendaten von einem anderen Lizenznehmer angelegt. Dies stellt sicher, dass Patientendaten immer ihrer behandelnden Praxis zugeordnet bleiben und beim Rücksenden per Container mit oder ohne erfolgte Änderungen automatisch richtig zugeordnet und synchronisiert werden.

Sollen importierte Daten dauerhaft in der übernehmenden Praxis verbleiben, können diese mittels Thumbnail-Kontextmenü [Senden an|Transfer] in den sog. Home-Client verschoben werden.

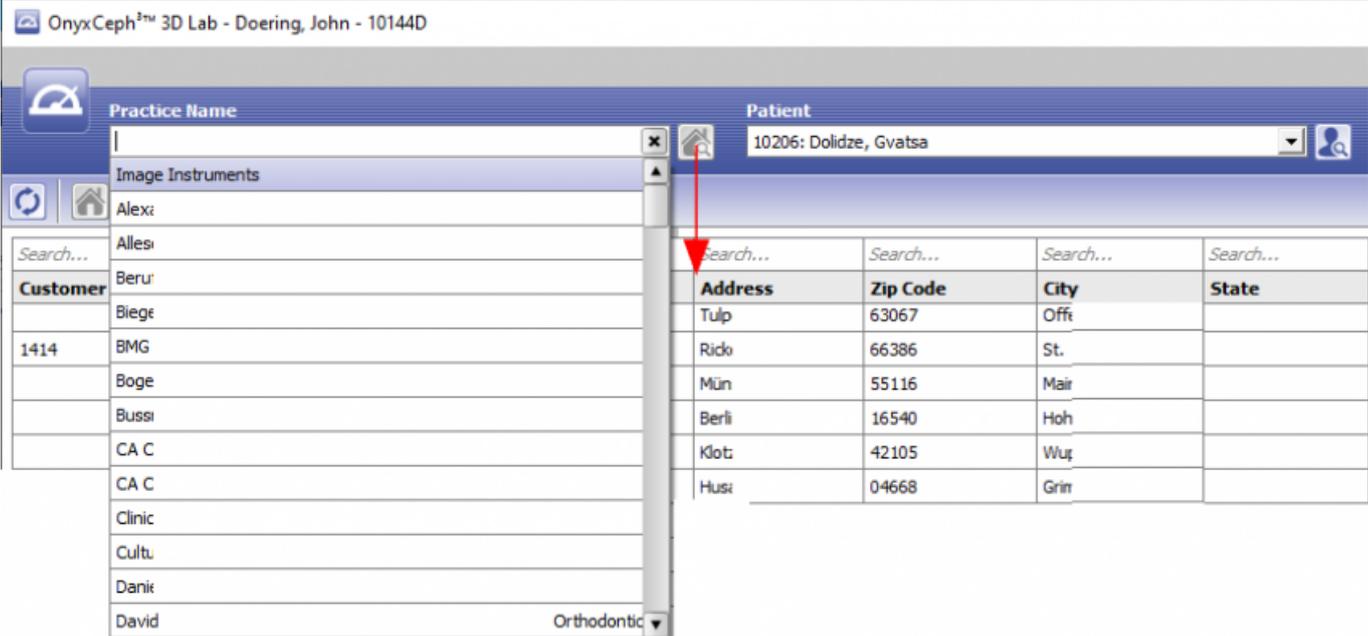

The screenshot shows the OnyxCeph<sup>3</sup>™ 3D Lab interface. The title bar reads "OnyxCeph<sup>3</sup>™ 3D Lab - Doering, John - 10144D". The interface is split into two main sections: "Practice Name" and "Patient".

The "Practice Name" section features a dropdown menu with a search field and a list of practice names: Alex, Alles, Beru, Biege, 1414, BMG, Boge, Bussi, CA C, CA C, Clinic, Cultu, Danik, and David. The "Orthodontic" category is selected at the bottom.

The "Patient" section shows a dropdown menu with the selected patient "10206: Dolidze, Gvatsa". Below this is a table of patients with columns for Address, Zip Code, City, and State. A red arrow points to the search field in the patient list.

Address	Zip Code	City	State
Tulp	63067	Offi	
Rick	66386	St.	
Mün	55116	Mair	
Berli	16540	Hoh	
Klot	42105	Wug	
Husi	04668	Grin	

Wird ein konkreter Mandant mittels PullDown aus der Praxis-Auswahlliste ausgewählt, wird im Hauptfenster die zugehörige Patientenliste angezeigt. Eine schnelle Filterung und Auswahl des gewünschten Clients kann durch Editieren (Schreiben) des Clientnamens im Feld [Praxisname] selbst erfolgen.

Mit der Icon-Taste rechts vom PullDown-Feld [Praxis] wird im Hauptfenster zunächst die Liste aller verfügbaren Klienten mit allen verfügbare Datenbankinformationen angezeigt. Auch hier kann die Auswahl und der Wechsel zum gewünschten Mandanten erfolgen. Mit [SHIFT]+[STRG]+Linksklick können zusätzlich die optional hinterlegte Server-Verbindungsdaten für Container-Uploads angezeigt werden.

From:  
<https://www.onyxwiki.net/> - [OnyxCeph<sup>3</sup>™ Wiki]

Permanent link:  
[https://www.onyxwiki.net/doku.php?id=pulldownmenu\\_praxis](https://www.onyxwiki.net/doku.php?id=pulldownmenu_praxis)

Last update: **2021/02/13 19:54**

