

Modul TADmatch™



Programmversion	BASIC	2D PRO	3D PRO	LAB	OMS
Verfügbarkeit	✗	✗	📄	📄	📄

✗

enthalten

nicht

📄

enthalten

immer

📄

enthalten


optional

Modul TADmatch™ ermöglicht die virtuelle Platzierung von Mini-Implantaten (TADs) aus einer internen Bibliothek auf einem Scan, der optional mit einem FRS oder mit einem Volumenscan kombiniert sein kann. Das Ergebnis kann als Befund gespeichert und in den Modulen [Ortho Apps 3D](#) oder [Bite Splint 3D](#) zur Konstruktion einer Platzierungshilfe verwendet werden.

Erste Schritte

1. Befunde im Modul Register3D zum Modell laden und registrieren
2. Schrauben im kombinierten Befund platzieren
3. Montage- oder Positionierungsmodell berechnen
4. Ergebnisse über Objektliste exportieren
5. Als Projekt und neuen Befund speichern

Moduloberfläche

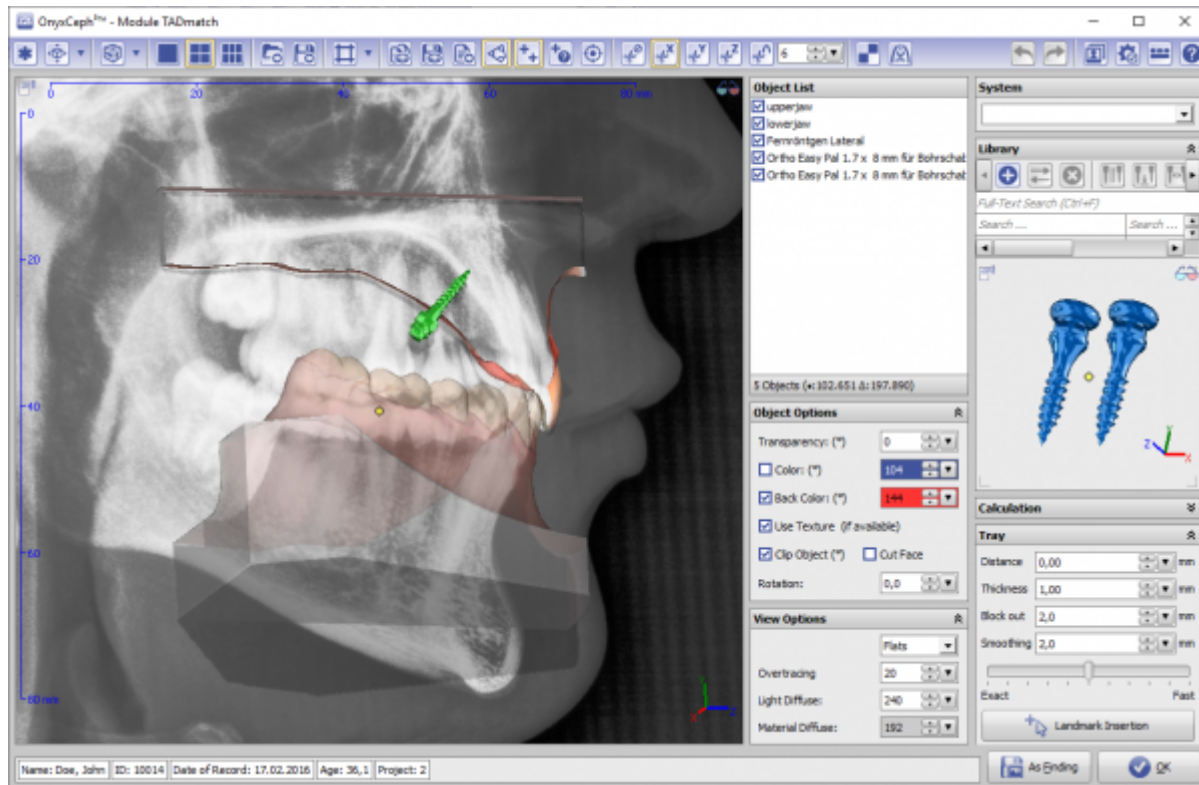

Verweise

	https://youtu.be/aIGwGjtqciw
	Pin-Liste

From:
<https://www.onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:
https://www.onyxwiki.net/doku.php?id=tadmatch_3d

Last update: **2024/03/02 15:34**

