
2023/12/15 03:45 1/3 Optionen Durchzeichnung

## **Optionen Durchzeichnung**

Über Taste [Optionen] in Panel Durchzeichnung lassen sich auf einzelnen Reitern verschiedenste Einstellungen in Hinblick auf Grafik-Overlays über 2D- und 3D-Bildfenstern vornehmen.

## **Reiter | Eingabefenster |**

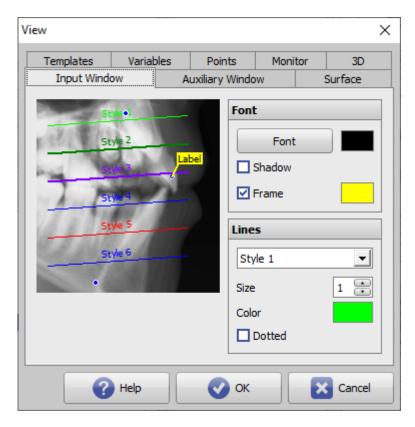


[Click auf Reiter öffnet zugehörigen Wiki-Seite]

## **Panel Schrift**

Hier lassen sich Schriftart, Schriftfarbe, und Hintergrundfarbe von Referenzpunkt-Labels (Punktbezeichnungen, Tooltips) vorgeben.


Die Einstellungen betreffen den lokalen Arbeitsplatz

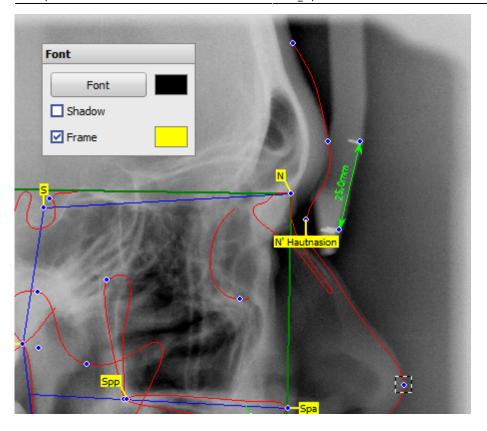

## **Panel Linien**

Hier kann für den in der Grafik links oder im Pulldown ausgewählten Linientyp [Style 1]...[Style 6] Größe, Farbe und Art der Linie definiert werden.

Die Einstellungen betreffen den lokalen Arbeitsplatz.

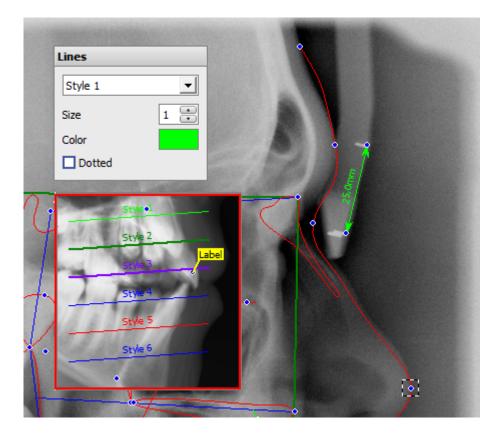

https://onyxwiki.net/ Printed on 2023/12/15 03:45

2023/12/15 03:45 3/3 Optionen Durchzeichnung

From:

https://onyxwiki.net/ - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:

https://onyxwiki.net/doku.php?id=to\_input

Last update: 2021/10/01 13:14

