

# **Fenster Kommentare und Attribute: Befund**

Mit Icon-Taste Attribute/Kommentare oder über den Thumbnail-Kontextmenü-Eintrag [Bildattribute] kann das Eigenschaftsfenster Kommentare und Attribute: Befund geöffnet werden. Das Fenster erscheint auch beim Speichern eines Befundes mit Taste [Als Befund speichern].

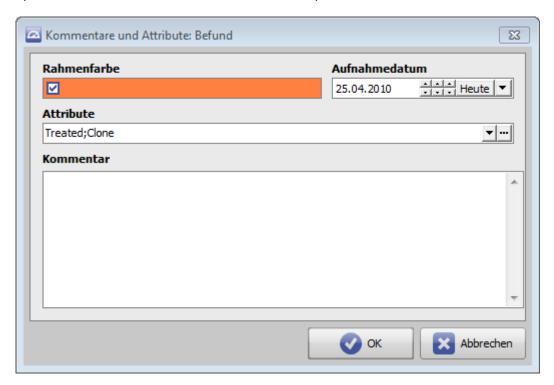

### Rahmenfarbe

Die eingestellte Farbe bestimmt die innere Rahmenfarbe der Miniaturbilder (Thumbnails).

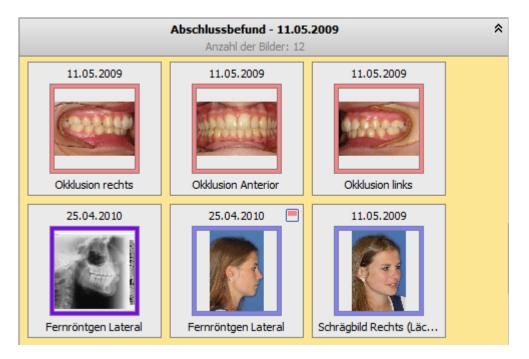


#### Last update: 2016/03/24 19:43

#### **Aufnahmedatum**


Das Bildaufnahmedatum wird initial vom importierten Bilddatensatz übernommen und kann bei Bedarf hier angepasst werden.

#### **Bildattribute**

Die Zuornung vordefinierter Attribute erfolgt im Pulldown der Attributzeile [▼].

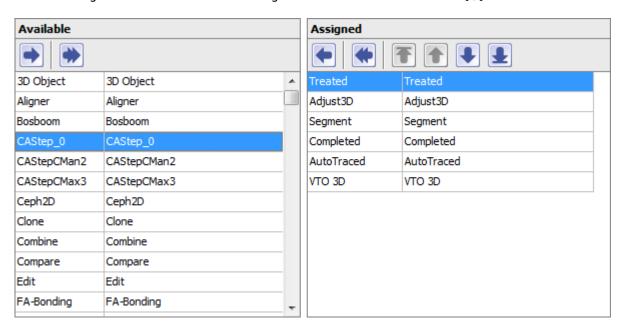

Die Bildattributliste kann im Dialogfenster mit Taste [...] editiert werden.

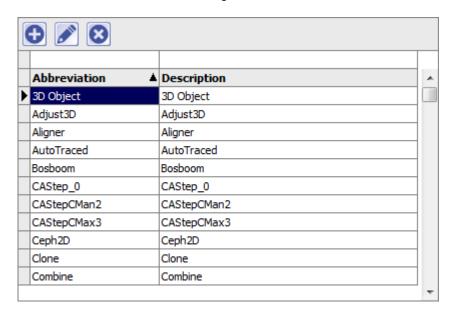


#### **Bildkommentare**

Zusätzlich zu vordefinierten Attributen können jedem Bildbefund Freitextkommentare variabler Länge zugeordnet werden.

http://www.onyxwiki.net/ Printed on 2023/11/04 18:53

## **Anzeige und Suche**

Auf das Vorhandensein von Attributen und/oder Kommentaren wird mit einem Marker oben rechts im Befund-Thumnail hingewiesen. Bei Mouseover über ein Befund-Thumbnail werden die zugewiesenen Attribute und/oder Kommentare im Hint angezeigt.

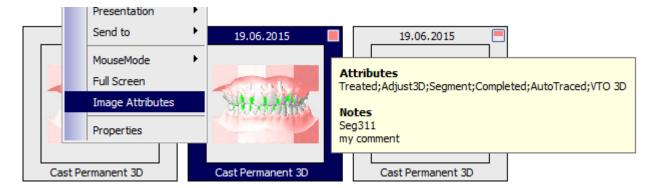

Attribute und Kommentare können in einer Volltextsuche identifiziert werden, indem die zutreffenden Befundthumbnails blau hinterlegt werden. Die Suchzeile wird mit [STRG] + F geöffnet. Zusätzlich besteht im Teilprogramm OnyxStat die Möglichkeit der patientenübergreifenden Filterung nach Bildattributen für Zwecke der statistischen Auswertung.



From:

http://www.onyxwiki.net/ - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:

http://www.onyxwiki.net/doku.php?id=wdw\_imageattributes

Last update: 2016/03/24 19:43

