

Workflow Aligner: Step Registration

Die Animation zeigt, wie die Option [Zwischenschritt registrieren] in Modul Aligner 3D verwendet werden kann, um zwei Behandlungssituationen (z.B. Malokklusion und aktuelle Situation) numerisch und grafisch zu vergleichen.

Eigentlich ist diese Option dafür gedacht, einen konkreten Aligner-Planungsschritt anhand eines Zwischenscans zu bewerten und ggfls. anzugleichen.

Um zuverlässige Ergebnisse zu erhalten muss sichergestellt sein, dass für die gegenseitige Vorausrichtung der beiden zu vergleichenden Befunde ausreichend viele und gleichverteilte Oberflächenbereiche ausgewählt werde. Sind solche Bereiche (z.B. im Untrekefer) nicht vorhanden, sollten Oberflächenbereiche benutzt werden, deren Abweichung sich im Mittel in etwa aufhebt, um das Ergebnis im Anschluss mit den Optionen der [manuellen Oberflächenregistrierung](#) zu optimieren.

From:
<http://onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:
http://onyxwiki.net/doku.php?id=workflow_aligner_register_step

Last update: **2023/01/24 07:30**



